

点検・修理報告書

管理 No. 20180220

発行日: 2018年 2月 20日

IC Washer			
作業年月日	2018 年 2 月 20 日		作業時間: 6 Hr
顧客名	ロイヤルティースデンタルクリニック 様		TEL:
所在地	東京都品川区南大井3-33-10 NORIビル2F		ご担当 様
販売店	株式会社モリタ 有明オフィス		ご担当 様
納入年月日	2015 年 10 月 26 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号: 100006	運転回数: 588	タッチパネルVer. 01.08 CPU Ver. 001014
不具合状況、依頼内容、異常履歴			
① 本体内部底面水漏れ			
② 運転中に電源シャットダウン			
原因			
① 乾燥空気ライン、ジョイントカンソウ、樹脂継手亀裂により洗浄中本体底面に大量の水漏れ発生して漏洩センサー検知			
② 本体前面ドア左側下部より水漏れにより電源SWに洗浄水が入り漏電の可能性があるが工場では再現せず。			
処置、作業内容			
① 乾燥空気ライン ジョイントカンソウ、樹脂継手の交換 ② 電源SW内部確認異常ありません			
③ 大量の洗浄水底面に漏れた為、底面を上水で洗い流し ④ パワーサプライ 5V、SDスロット防滴カバー、			
⑤ ドア開閉対策部品に交換 ⑥ 他点検異常はありません整備後試運転回数4回正常です。			
特記事項			
洗浄層内部の循環水ストレーナーに目詰まり等あり こまめな清掃をお願いします 循環水ポンプの故障、循環水圧低エラーの原因につながります。 洗浄層内部に器材の落し物あり循環水ポンプ故障の危険性あります。			

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	ジョイントカンソウ	762210390	1		
2	ドア開閉対策部品		1セット		
3	SDスロット防滴カバー取付		1		
4	パワーサプライ 5V防滴カバー取付		1		
5	シリコンシート固定金具取付		1		
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

ご署名

1800年 3月 20日



修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

責任技術者	作業者
桐野	桐野
'18/02/20	'18/02/20