

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成 27年 4月 14日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号	: 100446
作業年月日	平成 27年 4月 14日		作業時間	: Hr
顧客名	西江井島病院 御中		ご担当	: 院長先生 様
所在地	兵庫県明石市大久保町西島 6 5 3		電話番号	: 078-947-5311
販売店			ご担当	様
納入年月日	平成 24年 4月 25日	保証期間	内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 3回目	定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴	
不具合原因、作業内容	
点検項目	
フタロック 正常 ☒	殺菌槽 LED 正常 ☒
酸素ライン 正常 ☒	エアライン 正常 ☒
アルコールライン 正常 ☒	オゾン水濃度計動作 正常 ☒ ハルス数 909
オゾンセンサ 正常 ☒	排水栓、排水ライン 正常 ☒
給水ライン 正常 ☒	細管送水ライン 正常 ☒
濃度計流量 正常 ☒	排気ライン 正常 ☒
水位センサー 正常 ☒	オゾン濃度 正常 ☒ 履歴 0.71 ppm
水漏れ確認 正常 ☒	異常音、振動 正常 ☒
清掃 正常 ☒	電源コード 正常 ☒
トレー 正常 ☒	殺菌チューブ類 正常 ☒
殺菌槽コネクタ 正常 ☒	プログラムVer 正常 ☒ 0107 / T01.A
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項	

装置 情報	交換後運転回数: 453 回	更新 (リセット) (実施) ・未実施	殺菌: 425 回	殺菌+アル: 829 回
	リークチェック: 905 回	自己洗浄: 495 回	アルコール単独: 53 回	エア単独: 0 回

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品製造番号
定期交換部品セット		☒	1セット	オゾン水濃度計 NO.10050179 → NO.12061079
給水フィルター		☐	1個	オゾンセンサー NO.14038-016 → NO.130125-022
		☐		オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、コネクタ継手、
		☐		給水フィルターの5点は製造番号なし

お客様ご確認署名欄 ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。		年 月 日
ご署名 <u>丸澤 美由紀</u>		印

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
 大阪府大阪市中央区今橋 1-6-1
 TEL: 06-6228-3311

責任技術者	作業者
	中山