

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成 27年 6月 10日

販売名	オゾン水内視鏡消毒機　OED－１０００Ｓ			製造番号	: 300266
作業年月日	平成　27年　6月　10日			作業時間	: Hr
顧客名	木下内科診療所　御中			ご担当	: 院長先生　様
所在地	兵庫県伊丹市昆陽東4-13-4			電話番号	: 072-783-3990
販売店				ご担当	様
納入年月日	平成　26年　6月　13日	保証期間	内 ☒ 外 ☐	付属品	
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐	1回目	定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修　理 ☐	点検のみ ☐	その他 ☐	修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
不具合原因、作業内容			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 483
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.70 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	プログラムVer	正常 ☒ 0204/T02BV
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項			

装置情報	交換後運転回数: 423 回	更新 (リセット) ☒ 実施 ・ 未実施	消毒: 145 回	消毒+アル: 280 回
	リークチェック: 0 回	自己洗浄: 212 回	アルコール単独: 0 回	エア単独: 0 回

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品製造番号
定期交換部品セット		☒	1セット	オゾン水濃度計 NO.13021299 → NO.13021318
排水フィルター		☐	1個	オゾンセンサ NO.130109-011 → NO.120905-021
給水フィルター		☐	1個	オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、コネクタ継手、排水フィルター、給水フィルターの6点は製造番号なし
		☐		
		☐		

お客様ご確認署名欄	年 月 日
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。	
・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。	
ご署名 玉寄 薫,	

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋 1-6-1
TEL: 06-6228-3311

責任技術者	作業者
	中山