

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成 27年 6月 19日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号	: 100223
作業年月日	平成 27年 6月 19日		作業時間	: Hr
顧客名	大間知クリニック 御中		ご担当	: 院長先生 様
所在地	大阪府東大阪市長堂2丁目15-10		電話番号	: 06-6618-1000
販売店			ご担当	様
納入年月日	平成 23年 5月 12日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品	
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐ 4回目	定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐	点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
不具合原因、作業内容			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 506
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.70 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	プログラムVer	正常 ☒ 0107 / TOLA
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項			

装置 情報	交換後運転回数: 415 回	更新 (リセット) (実施) ・ 未実施	殺菌: 859 回	殺菌+アル: 1217 回
	リークチェック: 0 回	自己洗浄: 885 回	アルコール単独: 30 回	エア単独: 3 回

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品製造番号
定期交換部品セット		☒	1セット	オゾン水濃度計 NO. 100/0092 → NO. 10080375
給水フィルター		☐	1個	オゾンセンサ NO. 140526-010 → NO. 141219-003
		☐		オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、コネクタ継手、
		☐		給水フィルターの5点は製造番号なし

お客様ご確認署名欄	
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。	
ご署名	27年 6月 19日 山崎 由希

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋1-6-1
TEL: 06-6228-3311

責任技術者	作業者
	中山