

保守点検・修理 報告書

管理 No. _____
発行日 平成 27年 5月 28日

販売名	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S		製造番号	: 300102	
作業年月日	平成 27年 5月 28日		作業時間	:	Hr
顧客名	中川クリニック 御中		ご担当	:	院長先生 様
所在地	大阪府堺市堺区出島町2-6-24 山田ビル2階		電話番号	:	072-243-0100
販売店			ご担当	:	様
納入年月日	平成 25年 9月 30日	保証期間 内 ☒ 外 ☐	付属品		
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☒	定期点検シール記入 ☐			
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付 ☒			

不具合状況、依頼内容、異常履歴	
・5/28(木) 排水注意(E:111)1回、排水異常(E:401)1回、発生。	
不具合原因、作業内容	
・排水フィルタの目詰まり、排水ホースの屈曲により、排水異常が発生したと見られます。	
点検項目	
フタロック 正常 ☒	殺菌槽 LED 正常 ☒
酸素ライン 正常 ☒	エアライン 正常 ☒
アルコールライン 正常 ☒	オゾン水濃度計動作 正常 ☒ バルブ数 327
オゾンセンサ 正常 ☒	排水栓、排水ライン 正常 ☒
給水ライン 正常 ☒	細管送水ライン 正常 ☒
濃度計流量 正常 ☒	排気ライン 正常 ☒
水位センサー 正常 ☒	オゾン濃度 正常 ☒ 履歴 0.67 ppm
水漏れ確認 正常 ☒	異常音、振動 正常 ☒
清掃 正常 ☒	電源コード 正常 ☒
トレイ 正常 ☒	殺菌チューブ類 正常 ☒
殺菌槽コネクタ 正常 ☒	プログラムVer 正常 ☒ 0204/T02BV
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項	
・排水フィルタ新型、排水ホース屈曲部を除去し、正常終了。	

装置 情報	交換後運転回数: 52 回	更新(リセット)実施: ☒ 未実施	消毒: 7 回	消毒+アル: 86 回
	リークチェック: 0 回	自己洗浄: 0 回	アルコール単独: 0 回	エア単独: 0 回

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品製造番号
定期交換部品セット		☐	1セット	オゾン水濃度計 NO, ☒ → NO, ☒
排水フィルター	新型	☒	1個	オゾンセンサー NO, ☒ → NO, ☒
給水フィルター		☐	1個	オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、コネクタ継手、排水フィルター、給水フィルターの6点は製造番号なし
		☐		

お客様ご確認署名欄	
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。	
・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。	
年 月 日	
ご署名 有住 弘子	

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店 大阪府大阪市中央区今橋1-6-1 TEL: 06-6228-3311	責任技術者	作業者
		中山