

修理報告書（引取り修理）

修理依頼
番号

03-19233

No. 150515

配布先	納入先	新鋭工業株式会社 大阪支店 殿	機種	ONW-10
客先	所在地	兵庫県芦屋市船戸町4-1	機番	000996
環営	ユーザー名	芦屋三戸岡クリニック 様	納入日	平成18年3月31日
防品	点検者	中澤一裕	作業時間	
	受付日	平成27年2月25日	出荷日	平成27年5月14日
計	返送先	納入先と同じ		

修理依頼・不具合内容

- ・水漏れ（水槽亀裂）

不具合原因（故障箇所）と処置

[1] 点検結果（不具合箇所と不具合原因）

洗浄槽底部の亀裂を確認しました。何らかの衝撃が加わって底部が割れたと推測します。
今回は水槽を交換しました。（写真をご参照ください）

写真1：水槽亀裂部

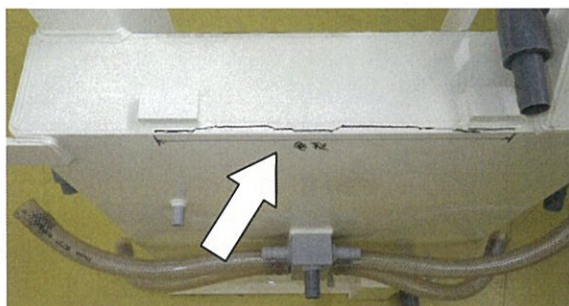


写真2：交換部品一式



[2] 修理・点検内容

1. 部品交換（下表および写真をご参照ください）
2. オゾン水濃度測定：0.47～0.53mg/L・・・正常
3. P S A（酸素発生装置）性能点検・・・正常

酸素濃度：94.2 % 酸素流量：0.78L/min 圧力：0.121～0.215MPa（AC100V、60Hz）

4. 運転動作確認・・・正常、オゾンインジケータ変色・・・正常
5. 運転カウンタ：8746

承認



審査



作成

H27. 5. 15

中澤

交換部品

部品番号	部品名称	数量	備考
	水位センサー（LVL、LVH、LVHH）	3本	
	洗浄水槽	1式	ホース含む

（株）IHIシバウラ