

保守点検・修理 報告書

管理 No. 発行日 平成 27年 5月 19日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000S		製造番号	: 300025	
作業年月日	平成 27年 5月 19日		作業時間	:	Hr
顧客名	太田クリニック 御中		ご担当	:	院長先生 様
所在地	兵庫県明石市二見町西二見89-7 兵庫二見ビル2階		電話番号	:	078-949-0388
販売店			ご担当	:	様
納入年月日	平成 25年 5月 8日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品		
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 2回目	定期点検ソール記入 ☒			
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐			

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目	
フタロック	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒
オゾンセンサ	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒
水漏れ確認	正常 ☒
清掃	正常 ☒
トレイ	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒
殺菌槽 LED	正常 ☒
エアライン	正常 ☒
オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 525
排水栓、排水ライン	正常 ☒
細管送水ライン	正常 ☒
排気ライン	正常 ☒
オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.170 ppm
異常音、振動	正常 ☒
電源コード	正常 ☒
殺菌チューブ類	正常 ☒
プログラムVer	正常 ☒ 0204/T02.B

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

装置 情報	交換後運転回数: 302 回	更新 (リセット) ☒ 実施 ・ 未実施	殺菌: 5 回	殺菌+アル: 624 回
	リークチェック: 0 回	自己洗浄: 506 回	アルコール単独: 0 回	エア単独: 2 回

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品製造番号
定期交換部品セット		☒	1セット	オゾン水濃度計 NO. 100/0085 → NO. 10090416
排水フィルター		☒	1個	オゾンセンサー NO. 140422-001 → NO. 140423-001
給水フィルター		☐	1個	オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、コネクタ継手、
		☐		排水フィルター、給水フィルターの6点は製造番号なし
		☐		

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。

・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

27年 5月 19日

ご署名 太田 昌資

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋1-6-1
TEL: 06-6228-3311

責任技術者	作業者
	中山