

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成 27年 5月 19日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号	: 100733	
作業年月日	平成 27年 5月 19日		作業時間	:	Hr
顧客名	黒田クリニック 御中		ご担当	:	院長先生 様
所在地	兵庫県尼崎市昭和通2-6-30尼崎イスティー1階		電話番号	:	06-6488-7222
販売店			ご担当	:	様
納入年月日	平成 25年 5月 16日	保証期間	内 ☐ 外 ☒	付属品	
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐	2回目	定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐	点検のみ ☐	その他 ☐	修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴	
不具合原因、作業内容	
点検項目	
フタロック 正常 ☒	殺菌槽 LED 正常 ☒
酸素ライン 正常 ☒	エアライン 正常 ☒
アルコールライン 正常 ☒	オゾン水濃度計動作 正常 ☒ バルブ数 628
オゾンセンサ 正常 ☒	排水栓、排水ライン 正常 ☒
給水ライン 正常 ☒	細管送水ライン 正常 ☒
濃度計流量 正常 ☒	排気ライン 正常 ☒
水位センサー 正常 ☒	オゾン濃度 正常 ☒ 履歴 0.70 ppm
水漏れ確認 正常 ☒	異常音、振動 正常 ☒
清掃 正常 ☒	電源コード 正常 ☒
トレイ 正常 ☒	殺菌チューブ類 正常 ☒
殺菌槽コネクタ 正常 ☒	プログラムVer 正常 ☒ 0107/TOL/A
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項	

装置 情報	交換後運転回数: 514回	更新(リセット) ☒ 実施・未実施	殺菌: 1074回	殺菌+アル: 0回
	リークチェック: 0回	自己洗浄: 550回	アルコール単独: 0回	エア単独: 0回

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品製造番号
定期交換部品セット		☒	1セット	オゾン水濃度計 NO.10090398 → NO.14011668
給水フィルター		☐	1個	オゾンセンサ NO.140318-014 → NO.140220-001
		☐		オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、コネクタ継手、
		☐		給水フィルターの5点は製造番号なし

お客様ご確認署名欄 ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 ・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。		27年 5月 19日 後藤
--	--	------------------

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
 大阪府大阪市中央区今橋1-6-1
 TEL: 06-6228-3311

責任技術者	作業者
	中山