

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成 27年 6月 3日

販売名	オゾン水内視鏡洗浄機 ONW-10		製造番号	: 379
作業年月日	平成 27年 6月 3日		作業時間	: Hr
顧客名	まえだクリニック 御中		ご担当	: 院長先生 様
所在地	大阪府大阪市東成区大今里4丁目26-11		電話番号	: 06-6977-1888
販売店			ご担当	様
納入年月日	平成 16年 4月 1日	保証期間	内 ☐ 外 ☒	
作業区分	保守点検 ☐	総合点検 ☐	回目	定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修理 ☐	点検のみ ☐	その他 ☒	修理表示貼付 ☐

点検項目		点検項目	
電源釦	正常 ☒	オゾン分解ファン	正常 ☒
フィルタリセット釦	正常 ☒	排水	正常 ☒
運転/停止釦	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
アルコールモード釦	正常 ☒	オゾンインジケータ	正常 ☐
操作パネル	正常 ☒	酸素発生	正常 ☐
蛍光灯	正常 ☒	水漏れ確認 装置外	正常 ☒
フタロック	正常 ☒	水漏れ確認 装置内	正常 ☒
給水	正常 ☒	洗浄コネクタ	正常 ☒
細管洗浄 順方向	正常 ☒	洗浄チューブ	正常 ☒
細管洗浄 逆方向	正常 ☒		
細管洗浄 エアパージ	正常 ☒		
アルコールフラッシュ	正常 ☒		

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

- ・アルコールモードで使用出来ない。原因：アルコールヤマトのリンが2個中に入っていた為、不具合がおきていた。
- ・酸素濃度が低下していた為、代替え器と交換し、修理見積りも後日提示しました。

装置情報	総運転回数: 775 回	更新(リセット) 実施 ☒ 未実施 ☐	交換後運転回数: 37 回
酸素発生	濃度: 42.4 %	流量: 0.179 L/min	圧力: 148 ~ 249 MPa

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品製造番号
オゾン分解触媒		☐	一式	吸着筒・吸湿筒
ドレン用フィルタ		☐	一式	NO, → NO,
吸着筒		☐	一個	オゾン分解触媒、ドレン用フィルタは製造番号なし
吸湿筒		☐	一個	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

27年6月3日

ご署名 前田 史一

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋1-6-1
TEL: 06-6228-3311

責任技術者 作業者

中山