

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成 27年 6月 16日

販売名	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S		製造番号	: 300310	
作業年月日	平成 27年 6月 16日		作業時間	:	Hr
顧客名	星光病院 御中		ご担当	:	院長先生 様
所在地	大阪府寝屋川市豊野町14-5		電話番号	:	072-824-3333
販売店			ご担当	:	様
納入年月日	平成 26年 6月 24日	保証期間	内 ☒ 外 ☐	付属品	
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐	1回目	定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐	点検のみ ☐	その他 ☐	修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴					
不具合原因、作業内容					
点検項目					
フタロック	正常	☒	殺菌槽 LED	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	エアライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ バルブ数 399
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.69 ppm
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
清掃	正常	☒	電源コード	正常	☒
トレー	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒	プログラムVer	正常	☒ 0204 / T02BV
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項					

装置 情報	交換後運転回数:	155回	更新(リセット) ☒ 実施・未実施	消毒:	24回	消毒+アル:	133回
	リークチェック:	1回	自己洗浄:	1回	アルコール単独:	1回	エア単独:

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品製造番号
定期交換部品セット		☒	1セット	オゾン水濃度計 NO. 13031347 → NO. 11120816
排水フィルター		☐	1個	オゾンセンサ NO. 130516-001 → NO. 141121-007
給水フィルター		☐	1個	オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、コネクタ継手、
アルコールキャップ		☒	11個	排水フィルター、給水フィルターの6点は製造番号なし
		☐		

お客様ご確認署名欄	
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。	
ご署名	27年 6月 16日

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
 大阪府大阪市中央区今橋1-6-1
 TEL: 06-6228-3311

責任技術者	作業者
	中山