

# 保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成 27年 7月 1日

|       |                                                                                        |                                               |                                                                  |          |              |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------|--------------|
| 販売名   | オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S                                                                   |                                               | 製造番号                                                             | : 300344 |              |
| 作業年月日 | 平成 27年 7月 1日                                                                           |                                               | 作業時間                                                             | :        | Hr           |
| 顧客名   | 堀井医院 御中                                                                                |                                               | ご担当                                                              | :        | 院長先生 様       |
| 所在地   | 大阪府茨木市舟木町5番26号                                                                         |                                               | 電話番号                                                             | :        | 0726-32-2233 |
| 販売店   |                                                                                        |                                               | ご担当                                                              | :        | 様            |
| 納入年月日 | 平成 26年 7月 28日                                                                          | 保証期間                                          | 内 <input checked="" type="checkbox"/> 外 <input type="checkbox"/> | 付属品      |              |
| 作業区分  | 保守点検 <input checked="" type="checkbox"/> 総合点検 <input type="checkbox"/> 1回目             | 定期点検シール記入 <input checked="" type="checkbox"/> |                                                                  |          |              |
| 出張・引取 | 修理 <input type="checkbox"/> 点検のみ <input type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/> | 修理表示貼付 <input type="checkbox"/>               |                                                                  |          |              |

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目

|          |    |                                     |           |    |                                                  |
|----------|----|-------------------------------------|-----------|----|--------------------------------------------------|
| フタロック    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 殺菌槽 LED   | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>              |
| 酸素ライン    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | エアライン     | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>              |
| アルコールライン | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | オゾン水濃度計動作 | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> パルス数 531     |
| オゾンセンサ   | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 排水栓、排水ライン | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>              |
| 給水ライン    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 細管送水ライン   | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>              |
| 濃度計流量    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 排気ライン     | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>              |
| 水位センサー   | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | オゾン濃度     | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> 履歴 0.70 ppm  |
| 水漏れ確認    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 異常音、振動    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>              |
| 清掃       | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 電源コード     | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>              |
| トレイ      | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 殺菌チューブ類   | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>              |
| 殺菌槽コネクタ  | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | プログラムVer  | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> 0204 / T02BV |

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

|          |          |        |                                                        |      |          |        |       |
|----------|----------|--------|--------------------------------------------------------|------|----------|--------|-------|
| 装置<br>情報 | 交換後運転回数: | 1614 回 | 更新 (リセット) <input checked="" type="checkbox"/> 実施 ・ 未実施 | 消毒:  | 717 回    | 消毒+アル: | 897 回 |
|          | リークチェック: | 0 回    | 自己洗浄:                                                  | 42 回 | アルコール単独: | 0 回    | エア単独: |

| 交換部品名称    | 部品コード | 交換                                  | 数量   | 交換部品製造番号                                              |
|-----------|-------|-------------------------------------|------|-------------------------------------------------------|
| 定期交換部品セット |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1セット | オゾン水濃度計 NO. 13051406 → NO. 12051054                   |
| 排水フィルター   |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1個   | オゾンセンサー NO. 130529-035 → NO. 121101-002               |
| 給水フィルター   | (中空系) | <input checked="" type="checkbox"/> | 1個   | オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、コネクタ継手、排水フィルター、給水フィルターの6点は製造番号なし |
|           |       | <input type="checkbox"/>            |      |                                                       |
|           |       | <input type="checkbox"/>            |      |                                                       |

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。

・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

27 年 7 月 1 日

ご署名 堀井 孝彦

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店  
大阪府大阪市中央区今橋 1-6-1  
TEL: 06-6228-3311

|       |     |
|-------|-----|
| 責任技術者 | 作業者 |
|       | 中山  |