

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成 27年 8月 25日

販売名	オゾン水内視鏡洗浄機 ONW-10			製造番号	: 1493
作業年月日	平成 27年 8月 25日			作業時間	: Hr
顧客名	高瀬クリニック 御中			ご担当	: 院長先生 様
所在地	兵庫県神戸市西区春日台3丁目3-22			電話番号	: 078-961-1001
販売店				ご担当	様
納入年月日	平成 19年 11月 19日	保証期間	内 ☐ 外 ☒	付属品	
作業区分	保守点検 ☐	総合点検 ☐	回目	定期点検ソール記入	☐
出張・引取	修理 ☐	点検のみ ☒	その他 ☐	修理表示貼付	☐

点検項目	点検項目
電源釦 正常 ☒	オゾン分解ファン 正常 ☒
フィルタリセット釦 正常 ☒	排水 正常 ☒
運転/停止釦 正常 ☒	異常音、振動 正常 ☒
アルコールモード釦 正常 ☒	オゾンインジケータ 正常 ☒
操作パネル 正常 ☒	酸素発生 正常 ☒
蛍光灯 正常 ☒	水漏れ確認 装置外 正常 ☒
フタロック 正常 ☒	水漏れ確認 装置内 正常 ☒
給水 正常 ☒	洗浄コネクタ 正常 ☒
細管洗浄 順方向 正常 ☒	洗浄チューブ 正常 ☒
細管洗浄 逆方向 正常 ☒	
細管洗浄 エアパージ 正常 ☒	
アルコールフラッシュ 正常 ☒	

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

・水漏れのため点検しました。機械に異常はありませんでした。
シンワの排管部から水漏れしていました。

装置情報	総運転回数: 1705 回	更新（リセット）実施・未実施 ☒	交換後運転回数: 363 回
酸素発生	濃度: 93.5 %	流量: 0.81 L/min	圧力: 125 ~ 217 MPa

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品製造番号
オゾン分解触媒		☐	一式	吸着筒・吸湿筒
ドレン用フィルタ		☐	一式	NO, → NO,
吸着筒		☐	一個	オゾン分解触媒、ドレン用フィルタは製造番号なし
吸湿筒		☐	一個	

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。

・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

27年 8月 25日

ご署名 高瀬 信明

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋1-6-1
TEL: 06-6228-3311

責任技術者	作業者
	中山