

保守点検・修理 報告書

管理 No. _____
発行日 平成 27年 7月 10日

販売名	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S		製造番号	: 300332	
作業年月日	平成 27年 7月 10日		作業時間	:	Hr
顧客名	和歌山生協病院 御中		ご担当	:	院長先生 様
所在地	和歌山県和歌山市有本143-1		電話番号	:	073-471-7711
販売店			ご担当	:	様
納入年月日	平成 26年 7月 25日	保証期間	内 ☒ 外 ☐	付属品	
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 1回目	定期点検シール記入 ☒			
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐			

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常	☒	殺菌槽 LED	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	エアライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ パルス数 576
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.69 ppm
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
清掃	正常	☒	電源コード	正常	☒
トレイ	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒	プログラムVer	正常	☒ 0204/T02BV

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

装置 情報	交換後運転回数: 418回	更新(リセット)実施・未実施	消毒: 210回	消毒+7L: 209回
	リークチェック: 159回	自己洗浄: 139回	7Lコル単独: 10回	エア単独: 0回

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品製造番号
定期交換部品セット		☒	1セット	オゾン水濃度計 NO. 13041375 → NO. 13041369
排水フィルター	(中室系)	☒	1個	オゾンセンサ NO. 130528-010 → NO. 140522-005
給水フィルター	(糸巻き)	☒	1個	オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、コネクタ継手、
アルコールキャップ		☒	1個	排水フィルター、給水フィルターの6点は製造番号なし
		☐		

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。

・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

平成 27年 7月 10日

ご署名 梅本

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店 大阪府大阪市中央区今橋1-6-1 TEL: 06-6228-3311	責任技術者	作業者
		中山