

修理報告書（引取り修理）

修理依頼
番号

03-19769

No. 150821

配布先	納入先	新鋭工業株式会社 大阪支店 殿			機種	ONW-10B
客先	所在地	京都府京都市伏見区向島津田町 58-49			機番	001704
環営	ユーザー名	きむら内科医院 様			納入日	平成 22 年 7 月 14 日
防品	点検者	中澤 一裕	作業時間		受付日	平成 27 年 6 月 11 日
	返送先	納入先と同じ			出荷日	平成 27 年 9 月 17 日
計	3					

修理依頼・苦情内容

電源が入らない

不具合原因（故障箇所）と処置

修理遅れまして大変申し訳ありませんでした。

〔1〕点検結果（不具合箇所と不具合原因）

電気系統と点検したところ、コントロール基板が原因で通電しませんでした。

雷サージによるダメージや経年劣化、接触不良ではなく、基板上の電気部品が単純に故障した状態でした。
このため基板全体を交換して復旧しました。

写真：交換部品一式



〔2〕修理・点検内容

- 部品交換（定期交換部品も含む）
 - オゾン水濃度測定：0.47～0.57mg/L・・・正常
 - 運転動作確認・・・正常
 - オゾンインジケータ変色・・・正常
- 運転カウンタ・・・基板交換に伴い「0」にリセット

交換部品

承認
安 75.9.28 田
審査
中 75.9.28 澤
作成
H27.9.28 中澤

部品名称	数量	備考
コントロール基板	1 枚	
オゾン分解触媒	1 個	今回無償
排水シリコンチューブ	1 本	今回無償