

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成 27年 9月 3日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号	: 100223
作業年月日	平成 27年 9月 3日		作業時間	: Hr
顧客名	大間知クリニック 御中		ご担当	: 院長先生 様
所在地	大阪府東大阪市長堂2丁目15-10		電話番号	: 06-6618-1000
販売店			ご担当	様
納入年月日	平成 23年 5月 12日	保証期間 内 ☒ 外 ☐	付属品	
作業区分	保守点検 ☐	総合点検 ☐	回目	定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修理 ☐	点検のみ ☐	その他 ☒	修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

・排水ホースが時々外れる。

不具合原因、作業内容

・排水ホース固定が緩んでいた。

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 309
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.68 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	プログラムVer	正常 ☒ 0/07 / TohA

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

・排水ホースを交換し固定確認し終了。

装置 情報	交換後運転回数: 81 回	更新(リセット)実施・未実施	殺菌: 879 回	殺菌+アル: 1278 回
	リークチェック: 0 回	自己洗浄: 916 回	アルコール単独: 31 回	エア単独: 3 回

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品製造番号
定期交換部品セット		☐	1セット	オゾン水濃度計 NO, → NO,
給水フィルター		☐	1個	オゾンセンサー NO, → NO,
排水ホース		☒	1本	オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、コネクタ継手、 給水フィルターの5点は製造番号なし
		☐		
		☐		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

27 年 9 月 3 日

ご署名 大間知クリニック

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋1-6-1
TEL: 06-6228-3311

責任技術者

作業者

中山