

保守点検・修理 報告書

管理 No. _____
発行日 平成 27年 8月 27日

販売名	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S		製造番号	: 300307	
作業年月日	平成 27年 8月 27日		作業時間	: _____ Hr	
顧客名	おくクリニック 御中		ご担当	: 院長先生 様	
所在地	和歌山県海南市名高243		電話番号	: 073-483-5421	
販売店			ご担当	様	
納入年月日	平成 26年 5月 23日	保証期間	内 ☒ 外 ☐	付属品	
作業区分	保守点検 ☐	総合点検 ☐	回目	定期点検シール記入 ☐	
出張・引取	修理 ☐	点検のみ ☐	その他 ☒	修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
・ アルコールキャップ破損。			
不具合原因、作業内容			
・ アルコールキャップのみ交換。			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 324
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.68 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	プログラムVer	正常 ☒ 0204/T02BV
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項			
・ アルコールキャップのみ交換し終了。			

装置 情報	交換後運転回数: 206 回	更新（リセット）実施・未実施 ☒	消毒: 147 回	消毒+アル: 252 回
	リークチェック: 0 回	自己洗浄: 231 回	アルコール単独: 34 回	エア単独: 1 回

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品製造番号
定期交換部品セット		☐	1セット	オゾン水濃度計 NO, → NO,
排水フィルター		☐	1個	オゾンセンサー NO, → NO,
給水フィルター		☐	1個	オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、コネクタ継手、
アルコールキャップ		☒	1個	排水フィルター、給水フィルターの6点は製造番号なし
		☐		

お客様ご確認署名欄	和歌山県海南市名高243 (医)生会 おくクリニック 奥 喜 全
・ 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。	
・ 本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。	
ご署名 _____	

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店 大阪府大阪市中央区今橋1-6-1 TEL: 06-6228-3311	責任技術者	作業者
		中山