

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成 27年 8月 4日

販売名	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S		製造番号	: 300131	
作業年月日	平成 27年 8月 4日		作業時間	:	Hr
顧客名	倉病院 御中		ご担当	:	院長先生 様
所在地	奈良県生駒市本町1-7		電話番号	:	0743-73-4888
販売店			ご担当	:	様
納入年月日	平成 25年 10月 17日	保証期間 内 ☒ 外 ☐	付属品		
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 回目	定期点検ソール記入 ☐			
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☒			

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
・ タッチパネルが故障した為、使用出来なくなった。			
不具合原因、作業内容			
・ タッチパネルが故障していた為、交換致しました。			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 364
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.65 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	プログラムVer	正常 ☒ 0207/T02BV
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項			
・ タッチパネル交換後、試運転し正常作動した為、終了致しました。			

装置 情報	交換後運転回数 :	回	更新（リセット）実施 ・ 未実施	消毒 :	回	消毒＋アル :	回
	リークチェック :	回	自己洗浄 :	回	アルコール単独 :	回	エア単独 :

交換部品名称	部品コード	交換	数量	＜ 交換部品製造番号 ＞
定期交換部品セット		☐	1セット	オゾン水濃度計 NO, → NO,
排水フィルター		☐	1個	オゾンセンサー NO, → NO,
給水フィルター		☐	1個	オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、コネクタ継手、
タッチパネル		☒	1個	排水フィルター、給水フィルターの6点は製造番号なし
		☐		タッチパネル : S/N・NO, 087374H027356→S/N・NO, 087374H016531

お客様ご確認署名欄	
・ 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。	
・ 本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。	
27 年 8 月 7 日	
ご署名 松井チヨ子	

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋 1-6-1
TEL : 06-6228-3311

責任技術者	作業者
	中山