

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成 27年 10月 9日

販売名	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S		製造番号	: 300114	
作業年月日	平成 27年 10月 9日		作業時間	:	Hr
顧客名	井上クリニック 御中		ご担当	:	院長先生 様
所在地	大阪府松原市田井城1丁目1-1 デイリーカート松原1階		電話番号	:	072-334-5050
販売店			ご担当	:	様
納入年月日	平成 25年 10月 2日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品		
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐	2回目	定期点検シール記入	☒
出張・引取	修理 ☐	点検のみ ☐	その他 ☐	修理表示貼付	☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常	☒	殺菌槽 LED	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	エアライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ ハル数 580
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.67 ppm
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
清掃	正常	☒	電源コード	正常	☒
トレイ	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒	プログラムVer	正常	☒ 0204/T02BV

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

装置 情報	交換後運転回数: 638 回	更新 (リセット) (実施) ・未実施	消毒: 446 回	消毒+アル: 663 回
	リークチェック: 0 回	自己洗浄: 1 回	アルコール単独: 26 回	エア単独: 0 回

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品製造番号
定期交換部品セット		☒	1セット	オゾン水濃度計 NO. 14071860 → NO. 12061092
排水フィルター (新型)		☒	1個	オゾンセンサー NO. 091215-006 → NO. 150313-004
給水フィルター		☐	1個	オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、コネクタ継手、排水フィルター、給水フィルターの6点は製造番号なし
		☐		
		☐		

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。

・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2015 年 10 月 9 日

院長 井上 豪

ご署名

修理業者	新鋭工業 株式会社 大阪支店	責任技術者	作業者
	大阪府大阪市中央区今橋 1-6-1		中山
	TEL: 06-6228-3311		