

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成 27年 10月 8日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号	: 100055	
作業年月日	平成 27年 10月 8日		作業時間	: Hr	
顧客名	大塚医院 御中		ご担当	: 院長先生 様	
所在地	京都府京都市右京区梅津前田町65-4		電話番号	: 075-881-3088	
販売店			ご担当	様	
納入年月日	平成 22年 7月 7日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品		
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 5回目	定期点検シール記入 ☒			
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐			

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
不具合原因、作業内容			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルス数 775
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.69 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	プログラムVer	正常 ☒ 0107/To1.A
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項			

装置 情報	交換後運転回数: 156 回	更新（リセット）実施 ☒ ・未実施 ☐	殺菌: 21 回	殺菌+アル: 796 回
	リークチェック: 0 回	自己洗浄: 837 回	アルコール単独: 0 回	エア単独: 0 回

交換部品名称	部品コード	交換	数量	< 交換部品製造番号 >
定期交換部品セット		☒	1セット	オゾン水濃度計 NO. 100/0071 → NO. 12071/21
給水フィルター		☐	1個	オゾンセンサー NO. 100/26-005 → NO. 150309-015
		☐		オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、コネクタ継手、
		☐		給水フィルターの5点は製造番号なし

お客様ご確認署名欄	
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。	
27年 10月 8日 京都市右京区梅津前田町65-4 医療法人 大塚医院 ご署名 大塚 弘 友	

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
 大阪府大阪市中央区今橋1-6-1
 TEL: 06-6228-3311

責任技術者	作業者
	中山