

## 保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成 27年 8月 5日

|       |                                        |                                                                       |                              |                                            |              |
|-------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|--------------|
| 販売名   | オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S                   |                                                                       | 製造番号                         | : 300554                                   |              |
| 作業年月日 | 平成 27年 8月 5日                           |                                                                       | 作業時間                         | :                                          | Hr           |
| 顧客名   | 勝野クリニック 御中                             |                                                                       | ご担当                          | :                                          | 院長先生 様       |
| 所在地   | 兵庫県神戸市垂水区城が山1丁目7-3 ブリックブロック            |                                                                       | 電話番号                         | :                                          | 078-753-8517 |
| 販売店   |                                        |                                                                       | ご担当                          | :                                          | 様            |
| 納入年月日 | 平成 27年 5月 6日                           | 保証期間 内 <input checked="" type="checkbox"/> 外 <input type="checkbox"/> | 付属品                          |                                            |              |
| 作業区分  | 保守点検 <input type="checkbox"/>          | 総合点検 <input type="checkbox"/>                                         | 回目                           | 定期点検シール記入 <input type="checkbox"/>         |              |
| 出張・引取 | 修理 <input checked="" type="checkbox"/> | 点検のみ <input type="checkbox"/>                                         | その他 <input type="checkbox"/> | 修理表示貼付 <input checked="" type="checkbox"/> |              |

## 不具合状況、依頼内容、異常履歴

- ・ 水位センサの感度が良すぎる物と悪い物があった為、交換致します。

## 不具合原因、作業内容

- ・ 水位センサ (L、H、HH) 3個を交換します。

## 点検項目

|          |    |                                     |           |    |                                                 |
|----------|----|-------------------------------------|-----------|----|-------------------------------------------------|
| フタロック    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 殺菌槽 LED   | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 酸素ライン    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | エアライン     | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| アルコールライン | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | オゾン水濃度計動作 | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> バルブ数 336    |
| オゾンセンサ   | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 排水栓、排水ライン | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 給水ライン    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 細管送水ライン   | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 濃度計流量    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 排気ライン     | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 水位センサー   | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | オゾン濃度     | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> 履歴 0.67 ppm |
| 水漏れ確認    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 異常音、振動    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 清掃       | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 電源コード     | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| トレイ      | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 殺菌チューブ類   | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 殺菌槽コネクタ  | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | プログラムVer  | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> 0205/T02C   |

## 作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

- ・ 水位センサ交換後、試運転し正常作動した為、終了。

|      |               |                |              |             |
|------|---------------|----------------|--------------|-------------|
| 装置情報 | 交換後運転回数: 65 回 | 更新(リセット)実施・未実施 | 消毒: 44 回     | 消毒+アル: 22 回 |
|      | リークチェック: 0 回  | 自己洗浄: 54 回     | アルコール単独: 1 回 | エア単独: 0 回   |

| 交換部品名称    | 部品コード    | 交換                                  | 数量   | 交換部品製造番号                     |
|-----------|----------|-------------------------------------|------|------------------------------|
| 定期交換部品セット |          | <input type="checkbox"/>            | 1セット | オゾン水濃度計 NO, → NO,            |
| 排水フィルター   |          | <input type="checkbox"/>            | 1個   | オゾンセンサー NO, → NO,            |
| 給水フィルター   |          | <input type="checkbox"/>            | 1個   | オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、コネクタ継手、 |
| 水位センサ     | (L、H、HH) | <input checked="" type="checkbox"/> | 3個   | 排水フィルター、給水フィルターの6点は製造番号なし    |
|           |          | <input type="checkbox"/>            |      |                              |

## お客様ご確認署名欄

- ・ 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・ 本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

27 年 8 月 5 日

ご署名

田中亜実

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店  
大阪府大阪市中央区今橋1-6-1  
TEL: 06-6228-3311

責任技術者

作業者

中山