

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成 27年 8月 5日

販売名	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S		製造番号	: 300531	
作業年月日	平成 27年 8月 5日		作業時間	:	Hr
顧客名	とみお岩崎クリニック 御中		ご担当	:	院長先生 様
所在地	奈良県奈良市二名3-1046-1		電話番号	:	0742-93-8755
販売店			ご担当	:	様
納入年月日	平成 27年 4月 3日	保証期間 内 ☒ 外 ☐	付属品		
作業区分	保守点検 ☐	総合点検 ☐	回目	定期点検シール記入 ☐	
出張・引取	修理 ☒	点検のみ ☐	その他 ☐	修理表示貼付 ☒	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

- ・ 水位センサの感度が良すぎる物と悪い物があった為、交換致します。

不具合原因、作業内容

- ・ 水位センサ (L、H、HH) 3個を交換します。

点検項目

フタロック	正常	☒	殺菌槽 LED	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	エアライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ パルス数 516
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.68 ppm
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
清掃	正常	☒	電源コード	正常	☒
トレイ	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒	プログラムVer	正常	☒ 0205/T02C

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

- ・ 水位センサ交換後、試運転し正常作動した為、終了。

装置情報	交換後運転回数: 22 回	更新 (リセット) 実施・未実施	消毒: 23 回	消毒+アル: 0 回
	リークチェック: 19 回	自己洗浄: 0 回	アルコール単独: 0 回	エア単独: 0 回

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品製造番号
定期交換部品セット		☐	1セット	オゾン水濃度計 NO, → NO,
排水フィルター		☐	1個	オゾンセンサ NO, → NO,
給水フィルター		☐	1個	オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、コネクタ継手、
水位センサ	(L、H、HH)	☒	3個	排水フィルター、給水フィルターの6点は製造番号なし
		☐		

お客様ご確認署名欄

- ・ 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・ 本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

ご署名

岩崎 拓也

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋 1-6-1
TEL: 06-6228-3311

責任技術者

作業者

中山