

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成 27年 10月 21日

販売名	オゾン水内視鏡洗浄機 ONW-10		製造番号	: 1793
作業年月日	平成 27年 10月 21日		作業時間	: Hr
顧客名	稲生医院 御中		ご担当	: 院長先生 様
所在地	和歌山県東牟婁郡串本町串本1735-52		電話番号	: 0735-62-3811
販売店			ご担当	様
納入年月日	平成 21年 3月 27日	保証期間	内 <input type="checkbox"/> 外 <input checked="" type="checkbox"/>	付属品
作業区分	保守点検 <input checked="" type="checkbox"/>	総合点検 <input type="checkbox"/>	6回目	定期点検ソール記入 <input checked="" type="checkbox"/>
出張・引取	修理 <input type="checkbox"/>	点検のみ <input type="checkbox"/>	その他 <input type="checkbox"/>	修理表示貼付 <input type="checkbox"/>

点検項目		点検項目	
電源釦	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	オゾン分解ファン	正常 <input checked="" type="checkbox"/>
フィルタリセット釦	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	排水	正常 <input checked="" type="checkbox"/>
運転/停止釦	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	異常音、振動	正常 <input checked="" type="checkbox"/>
アルコールモード釦	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	オゾンインジケータ	正常 <input checked="" type="checkbox"/>
操作パネル	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	酸素発生	正常 <input checked="" type="checkbox"/>
蛍光灯	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	水漏れ確認 装置外	正常 <input checked="" type="checkbox"/>
フタロック	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	水漏れ確認 装置内	正常 <input checked="" type="checkbox"/>
給水	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	洗浄コネクタ	正常 <input checked="" type="checkbox"/>
細管洗浄 順方向	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	洗浄チューブ	正常 <input checked="" type="checkbox"/>
細管洗浄 逆方向	正常 <input checked="" type="checkbox"/>		
細管洗浄 エアパーズ	正常 <input checked="" type="checkbox"/>		
アルコールフラッシュ	正常 <input checked="" type="checkbox"/>		

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

装置情報	総運転回数: 4,135 回	更新(リセット) <input checked="" type="checkbox"/> 実施・未実施	交換後運転回数: 685 回
酸素発生	濃度: 93.2 %	流量: 0.78 L/min	圧力: 99 ~ 181 MPa

交換部品名称	部品コード	交換	数量	< 交換部品製造番号 >
オゾン分解触媒		<input checked="" type="checkbox"/>	一式	吸着筒・吸湿筒
ドレン用フィルタ		<input checked="" type="checkbox"/>	一式	NO. SPS-11237 → NO. SPS-11840
吸着筒		<input checked="" type="checkbox"/>	一個	オゾン分解触媒、ドレン用フィルタは製造番号なし
吸湿筒		<input checked="" type="checkbox"/>	一個	
		<input type="checkbox"/>		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

稲生医院
院長 稲生 誠樹

ご署名

☎(0735)62-3811

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋 1-6-1
TEL: 06-6228-3311

責任技術者 作業者

中山