

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成 27年 8月 10日

販売名	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S		製造番号	: 300530
作業年月日	平成 27年 8月 10日		作業時間	: Hr
顧客名	たかあきクリニック 御中		ご担当	: 院長先生 様
所在地	京都府京都市下京区中堂寺坊城町31-7 メディテック1階		電話番号	: 075-822-8221
販売店			ご担当	様
納入年月日	平成 27年 4月 7日	保証期間 内 ☒ 外 ☐	付属品	
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 回目	定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☒		

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
・ 水位センサの感度が良すぎる物と悪い物があつた為、交換致します。			
不具合原因、作業内容			
・ 水位センサ (L、H、HH) 3個を交換します。			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 511
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.64 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	プログラムVer	正常 ☒ 0205/T020
作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項			
・ 水位センサ交換後、試運転し正常作動した為、終了。			

装置 情報	交換後運転回数: 70 回	更新 (リセット) 実施 ☒ 未実施 ☐	消毒: 23 回	消毒+アル: 47 回
	リークチェック: 68 回	自己洗浄: 1 回	アルコール単独: 0 回	エア単独: 0 回

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品製造番号
定期交換部品セット		☐	1セット	オゾン水濃度計 NO. → NO.
排水フィルター		☐	1個	オゾンセンサー NO. → NO.
給水フィルター		☐	1個	オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、コネクタ継手、
水位センサ	(L、H、HH)	☒	3個	排水フィルター、給水フィルターの6点は製造番号なし
		☐		

お客様ご確認署名欄	
・ 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。	
・ 本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。	
ご署名	年 月 日
高野 弘幸	

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋 1-6-1
TEL: 06-6228-3311

責任技術者	作業者
	中山