

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成 27年 11月 9日

販売名	オゾン水内視鏡洗浄機 ONW-10		製造番号	: 1787	
作業年月日	平成 27年 11月 9日		作業時間	:	Hr
顧客名	山内医院 御中		ご担当	:	院長先生 様
所在地	兵庫県西宮市甲東園3-1-37		電話番号	:	0798-52-0306
販売店			ご担当	:	様
納入年月日	平成 21年 4月 9日	保証期間	内 ☐ 外 ☒	付属品	
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐	3回目	定期点検シール記入	☒
出張・引取	修理 ☐	点検のみ ☐	その他 ☐	修理表示貼付	☐

点検項目			点検項目		
電源釦	正常	☒	オゾン分解ファン	正常	☒
フィルタリセット釦	正常	☒	排水	正常	☒
運転/停止釦	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
アルコールモード釦	正常	☒	オゾンインジケータ	正常	☒
操作パネル	正常	☒	酸素発生	正常	☒
蛍光灯	正常	☒	水漏れ確認 装置外	正常	☒
フタロック	正常	☒	水漏れ確認 装置内	正常	☒
給水	正常	☒	洗浄コネクタ	正常	☒
細管洗浄 順方向	正常	☒	洗浄チューブ	正常	☒
細管洗浄 逆方向	正常	☒			
細管洗浄 エアパージ	正常	☒			
アルコールフラッシュ	正常	☒			
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項					

装置情報	総運転回数: 978 回	更新(リセット) 実施・未実施	交換後運転回数: 144 回
酸素発生	濃度: 93.1 %	流量: 0.78 L/min	圧力: 109 ~ 192 MPa

交換部品名称	部品コード	交換	数量	＜ 交換部品製造番号 ＞
オゾン分解触媒		☒	一式	吸着筒・吸湿筒
ドレン用フィルタ		☒	一式	NO. SPS-11248 → NO. SPS-11701
吸着筒		☒	一個	オゾン分解触媒、ドレン用フィルタは製造番号なし
吸湿筒		☒	一個	
		☐		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

ご署名



修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋 1-6-1
TEL: 06-6228-3311

責任技術者 作業者

中山