

修理報告書（引取り修理）

修理依頼番号

03-20043

No. 151102

配布先	納入先	新鋭工業（株）大阪支店 殿		機種	ONW-10
客先	所在地	和歌山県御坊市湯川町小松原 615-1		機番	000684
環営	ユーザー名	紀伊クリニック 様		納入日	平成16年10月1日
環品	点検者	中澤一裕	作業時間	受付日	平成27年7月15日
計	返送先	納入先と同じ		発送日	平成27年10月31日

修理依頼・異常内容

排水不良（排水工程が止まらない）

※岡山工場点検中に「給水量不足」異常発生

不具合原因（故障箇所）と処置予定

[1] 点検結果（不具合箇所と不具合原因）

水位センサーの検知感度が劣化したために「排水不良」や「給水量不足」が発生しました。
排水ポンプもダメージが見られたので交換しました。

写真1：定期交換部品

写真2：水位レベルセンサー、排水ポンプ、チューブ



[2] 修理・点検内容

- 部品交換・・・下表と写真をご参照ください。
- オゾン水濃度測定：0.53～0.62mg/L・・・正常
- PSA（酸素発生装置）性能点検
酸素濃度：93.6% 酸素流量：0.76L/min 圧力：0.096～0.166MPa
- 運転確認 異常なし。インジケータ変色 異常なし
- 運転カウンタ：5044

一以上一

交換部品

部品番号	部品名称	数量	備考
	定期交換部品	1式	
	吸着筒、吸湿筒、ドレンフィルタ、分解触媒		SPS-11855
	オゾンセンサー	1台	
	水位レベルセンサー（LVL）	1本	
	排水ポンプ（P-3）	1台	
	配管チューブ、パッキン	1式	タチシート含む

承認



審査



作成

H27.11.2

中澤