

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成 27年 11月 6日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号	: 100051	
作業年月日	平成 27年 11月 6日		作業時間	:	Hr
顧客名	かねみつ内科医院 御中		ご担当	:	院長先生 様
所在地	京都府京都市右京区太秦下刑部町181番地		電話番号	:	075-873-8686
販売店			ご担当	:	様
納入年月日	平成 22年 5月 11日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品		
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 5回目	定期点検シール記入 ☒			
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐			

不具合状況、依頼内容、異常履歴	
不具合原因、作業内容	
点検項目	
フタロック 正常 ☒	殺菌槽 LED 正常 ☒
酸素ライン 正常 ☒	エアライン 正常 ☒
アルコールライン 正常 ☒	オゾン水濃度計動作 正常 ☒ パルス数 682
オゾンセンサ 正常 ☒	排水栓、排水ライン 正常 ☒
給水ライン 正常 ☒	細管送水ライン 正常 ☒
濃度計流量 正常 ☒	排気ライン 正常 ☒
水位センサー 正常 ☒	オゾン濃度 正常 ☒ 履歴 0.70 ppm
水漏れ確認 正常 ☒	異常音、振動 正常 ☒
清掃 正常 ☒	電源コード 正常 ☒
トレイ 正常 ☒	殺菌チューブ類 正常 ☒
殺菌槽コネクタ 正常 ☒	プログラムVer 正常 ☒ 0107/To1.A
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項	

装置 情報	交換後運転回数: 1050回	更新（リセット）実施 ☒ ・未実施 ☐	殺菌: 1504 回	殺菌+アル: 3086 回
	リークチェック: 0 回	自己洗浄: 6.5 回	アルコール単独: 6 回	エア単独: 0 回

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品製造番号
定期交換部品セット		☒	1セット	オゾン水濃度計 NO. 14071866 → NO. 12051007
給水フィルター		☐	1個	オゾンセンサ NO. 141002-005 → NO. 150115-005
アルコールキャップ (破損の為交換)		☒	1個	オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、コネクタ継手、 給水フィルターの5点は製造番号なし
		☐		
		☐		

お客様ご確認署名欄		年 月 日
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。		
・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。		
ご署名		

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋 1-6-1
TEL: 06-6228-3311

責任技術者	作業者
	中山