

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成 27年 10月 13日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機　OED－１０００			製造番号	: 100323
作業年月日	平成　27年　10月　13日			作業時間	: Hr
顧客名	そりおクリニック　御中			ご担当	: 院長先生　様
所在地	兵庫県宝塚市栄町2-2-1　ソリオ宝塚3号棟1階			電話番号	: 0797-81-4655
販売店				ご担当	様
納入年月日	平成　23年　10月　6日	保証期間	内 ☐ 外 ☒	付属品	
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐	4回目	定期点検シール記入	☒
出張・引取	修　理 ☐	点検のみ ☐	その他 ☐	修理表示貼付	☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
不具合原因、作業内容			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 598
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.69 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	プログラムVer	正常 ☒ 0107/To1.A
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項			

装置 情報	交換後運転回数: 104回	更新(リセット) ☒ 実施・未実施	殺菌: 6回	殺菌+7L: 448回
	リークチェック: 0回	自己洗浄: 435回	アルコール単独: 0回	エア単独: 0回

交換部品名称	部品コード	交換	数量	＜ 交換部品製造番号 ＞
定期交換部品セット		☒	1セット	オゾン水濃度計 NO. 14071869 → NO. 13081487
給水フィルター		☐	1個	オゾンセンサー NO. 141002-008 → NO. 130529-001
		☐		オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、コネクタ継手、
		☐		給水フィルターの5点は製造番号なし

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。

・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

ご署名 まい

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋1-6-1
TEL: 06-6228-3311

責任技術者	作業者
<u> まい </u>	中山