

保守点検・修理 報告書

管理 No. _____
発行日 平成 27年 8月 27日

販売名	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S		製造番号	: 300332	
作業年月日	平成 27年 8月 27日		作業時間	:	Hr
顧客名	和歌山生協病院 御中		ご担当	:	院長先生 様
所在地	和歌山県和歌山市有本143-1		電話番号	:	073-471-7711
販売店			ご担当	:	様
納入年月日	平成 26年 7月 25日	保証期間	内 ☒ 外 ☐	付属品	
作業区分	保守点検 ☐	総合点検 ☐	回目	定期点検シート記入 ☐	
出張・引取	修理 ☐	点検のみ ☐	その他 ☒	修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴					
不具合原因、作業内容					
点検項目					
フタロック	正常	☒	殺菌槽 LED	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	エアライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ バルス数 495
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.69 ppm
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
清掃	正常	☒	電源コード	正常	☒
トレイ	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒	プログラムVer	正常	☒ 0204/T02BV
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項					
給水フィルターセットの設置、脱気フィルターを交換し 終了しました。					

装置 情報	交換後運転回数:	62 回	更新（リセット）実施・未実施	消毒:	241 回	消毒+アル:	240 回
	リークチェック:	191 回	自己洗浄:	158 回	アルコール単独:	10 回	エア単独:

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品製造番号
定期交換部品セット		☐	1セット	オゾン水濃度計 NO, → NO,
排水フィルター		☐	1個	オゾンセンサー NO, → NO,
給水フィルター	(中空糸)	☒	1個	オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、コネクタ継手、
脱気フィルター		☒	1枚	排水フィルター、給水フィルターの6点は製造番号なし
		☐		

お客様ご確認署名欄	2015 年 8 月 27 日
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。	
・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。	
ご署名	野田 優子

修理業者	新鋭工業 株式会社 大阪支店 大阪府大阪市中央区今橋1-6-1 TEL: 06-6228-3311	責任技術者	中山
------	---	-------	----