

修理報告書（引取り修理）

修理依頼番号

03-19644

No. 150821

配布先	客先	納入先	新鋭工業株式会社 大阪支店 殿	機種	ONW-10
環営	防品	所在地	大阪府豊中市西泉ヶ丘3-1-25-201	機番	001210
		ユーザー名	みなみ内科クリニック 様	納入日	平成19年1月19日
		点検者	中澤 一裕	作業時間	6 Hr
		受付日	平成27年5月19日	出荷日	平成27年8月20日
計	3	返送先	納入先と同じ		

修理依頼・苦情内容

インジケータ変色不良。 酸素濃度 36.3%（規定値は90%以上）

不具合原因（故障箇所）と処置

[1] 点検結果（不具合箇所と不具合原因）

酸素発生濃度が低下しており、これが原因でインジケータの変色が悪くなっていました。
この部品と経年劣化した部品を交換して復旧しました。

写真1：定期交換部品



写真2：エアコンプレッサ他



写真3：水ポンプ他



[2] 修理・点検内容

- 部品交換（写真をご参照ください）
- 運転プログラムバージョンアップ・・・Ver. 8⇒Ver. 10
12回運転するとフィルターランプが点滅して清掃時期をお知らせします。
- オゾン水濃度測定：0.41～0.55mg/L・・・正常
- PSA（酸素発生装置）性能点検・・・正常
酸素濃度：93.9% 酸素流量：0.80 L/min 圧力：0.107～0.186 MPa（AC100V、60Hz）
- 運転動作確認・・・正常
- オゾンインジケータ変色・・・正常 運転カウンタ・・・1801

交換部品

承認	部品名称	数量	備考
安 15.8.21 田	写真1；1～3	定期交換部品	1式
	吸着・吸湿筒、フィルタ、オゾン分解触媒		SPS-11754
審査	写真3；4、7、8	水ポンプ	3台
中 15.8.21 澤	写真3；5	水位レベルセンサー	3本
	写真3；6	配管チューブ、パッキン	1式
作成	写真2；9	エアコンプレッサー	1台
	写真2；10	給水電磁弁	2個
H27. 8. 21	写真2；11	排水バルブ（駆動用抵抗）	1式
中澤	写真2	フタスプリング	4個 今回無償