

保守点検・修理 報告書

管理 No. _____
発行日 平成 27年 9月 11日

販売名	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S		製造番号	: 300377
作業年月日	平成 27年 9月 11日		作業時間	: _____ Hr
顧客名	阿部内科 御中		ご担当	: 院長先生 様
所在地	兵庫県三田市弥生が丘1丁目11フラワータウン駅ビル7階		電話番号	: 079-562-8478
販売店			ご担当	様
納入年月日	平成 26年 9月 22日	保証期間 内 ☒ 外 ☐	付属品	
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 1回目	定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
不具合原因、作業内容			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 401
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.68 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	プログラムVer	正常 ☒ 0205/T02C
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項			

装置 情報	交換後運転回数: 192 回	更新（リセット）実施 ☒ ・未実施 ☐	消毒: 75 回	消毒+アル: 118 回
	リークチェック: 0 回	自己洗浄: 1 回	アルコール単独: 1 回	エア単独: 5 回

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品製造番号
定期交換部品セット		☒	1セット	オゾン水濃度計 NO. 13061439 → NO. 10060288
排水フィルター	新型	☒	1個	オゾンセンサ NO. 130723-014 → NO. 130529-011
給水フィルター		☐	1個	オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、コネクタ継手、排水フィルター、給水フィルターの6点は製造番号なし
		☐		

お客様ご確認署名欄	
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。	
・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。	
年 _____ 月 _____ 日	
ご署名 湯浅 早苗	

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店 大阪府大阪市中央区今橋 1-6-1 TEL: 06-6228-3311	責任技術者	作業者
		中山