

保守点検・修理 報告書

管理 No. _____
発行日 平成 27年 9月 16日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号	: 100168	
作業年月日	平成 27年 9月 16日		作業時間	: _____ Hr	
顧客名	さとう医院 御中		ご担当	: 院長先生 様	
所在地	京都府亀岡市千代川町高野林西ノ畑27		電話番号	: 0771-25-8851	
販売店			ご担当	様	
納入年月日	平成 23年 5月 14日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品		
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐	4回目	定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐	点検のみ ☐	その他 ☐	修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目					
フタロック	正常	☒	殺菌槽 LED	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	エアライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ バルブ数 704
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.70 ppm
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
清掃	正常	☒	電源コード	正常	☒
トレイ	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒	プログラムVer	正常	☒ 0107/TOLA

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

装置 情報	交換後運転回数: 264 回	更新（リセット）実施 ☒ ・未実施 ☐	殺菌: 295 回	殺菌+アル: 525 回
	リークチェック: 324 回	自己洗浄: 347 回	アルコール単独: 2 回	エア単独: 0 回

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品製造番号
定期交換部品セット		☒	1セット	オゾン水濃度計 NO. 10070336 → NO. 16040133
給水フィルター		☐	1個	オゾンセンサー NO. 101026-018 → NO. 110830-017
		☐		オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、コネクタ継手、
		☐		給水フィルターの5点は製造番号なし
		☐		

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。

・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

27. 9. 16 日

ご署名 医療法人 さとう医院

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋1-6-1
TEL: 06-6228-3311

責任技術者	作業者
	中山