

修理報告書（引取り修理）

修理依頼番号

03-20164

No. 150928

納入先	新鋭工業株式会社 大阪支店 殿		機種	ONW-10
所在地	兵庫県揖保郡太子町立岡123		機番	000928
ユーザー名	二ノ丸内科 様		納入日	平成18年1月16日
点検者	中澤一裕	作業時間	受付日	平成27年8月6日
返送先	納入先と同じ		出荷日	平成27年9月26日

修理依頼・不具合内容

エラー2（洗浄中水位低下）

不具合原因（故障箇所）と処置

[1] 点検結果（不具合箇所と不具合原因）

運転条件を振って確認しましたが、エラー2は再現しませんでした。
このため推定原因の①を考えて、水位レベルセンサーを交換しました。
これで様子を見てくださいますようお願いいたします。

エラー2の推定原因

- ①水位レベルセンサーLVHの検知感度の劣化
- ②排水シリコンチューブが劣化して水位を保持できなくなった（平成26年6月交換済み）
- ③洗浄チューブが内視鏡から外れて、そこからの送気が水面を動揺させて水位が下がった

写真：水位レベルセンサーLVH、LVHH



[2] 修理・点検内容

1. オゾン水濃度測定：0.48～0.54mg/L・・・正常
2. PSA（酸素発生装置）性能点検・・・正常
酸素濃度：92.8% 酸素流量：0.77 L/min 圧力：0.121～0.209 MPa（AC100V 60Hz）
3. 運転動作確認・・・正常
4. オゾンインジケータ変色・・・正常
5. 運転カウンタ：1131

—以上—

交換部品

部品番号	部品名称	数量	備考
	水位レベルセンサー	2	LVH、LVHH

承認



審査



作成

H27. 9. 28

中澤