

保守点検・修理 報告書

管理 No. 20150915

発行日 平成27年9月15日

販売名	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S		製造番号:	300473
作業年月日	平成27年9月14日		作業時間:	Hr
顧客名	公立 定東総合病院 様		TEL:	0790-62-2410
所在地	兵庫県定東市山崎町鹿沢93		担当	様
販売店			担当	様
納入年月日	平成27年 1 月 28 日	保証期間 内 ☒ 外 ☐	付属品	なし
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目		定期点検シール記入	☐
出張 <u>引取</u>	修理 ☒		修理表示貼付	☒

不具合状況、依頼内容、異常履歴

オゾン水生成注意。(7/15, 8/5, 8/6, 8/7, 8/10, 8/11)

不具合原因、作業内容

オゾン水濃度の上昇が原因でこの異常が発生します。(180秒, 0.65ppmが規定です)
機械も点検した結果異常はありませんでした。
運転プログラムを Ver0207 にバージョンアップしました。

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒ 0.80→0.92%min 調整	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バッテリー数
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.68 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

水温が高い (25℃以上) ためこの異常は発生し易くなります。
酸素流量を増やしてオゾン生成量を増やしました。これで様子を見て下さい。

装置 情報	交換後運転回数: 1052	更新 (リセット) 実施・未実施 ☒	消毒: 290	消毒+7L: 762
	リークチェック: 640	自己洗浄: 19	アルコール単独: 1	エア単独: 1

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
膜交換フィルタ		☒	1			☐	
8/6 新鋭工業膜交換		☐				☐	
		☐				☐	
		☐				☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

ご署名

栗山盛明

印

修理業者 株式会社 IHI シパウラ 岡山事業所
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528

責任技術者

作業者

H27.9.15



中澤

OED-1000S 300473号 平成27年8月 運転グラフ

