

保守点検・修理 報告書

管理 No. \_\_\_\_\_

発行日 平成 27年 9月 28日

|       |                                                                                        |                                                                       |      |          |              |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------|----------|--------------|
| 販売名   | オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S                                                                   |                                                                       | 製造番号 | : 300045 |              |
| 作業年月日 | 平成 27年 9月 28日                                                                          |                                                                       | 作業時間 | :        | Hr           |
| 顧客名   | 橋村医院 御中                                                                                |                                                                       | ご担当  | :        | 院長先生 様       |
| 所在地   | 大阪府大阪市浪速区大国2-6-11                                                                      |                                                                       | 電話番号 | :        | 06-6641-6512 |
| 販売店   |                                                                                        |                                                                       | ご担当  | :        | 様            |
| 納入年月日 | 平成 25年 9月 1日                                                                           | 保証期間 内 <input type="checkbox"/> 外 <input checked="" type="checkbox"/> | 付属品  |          |              |
| 作業区分  | 保守点検 <input checked="" type="checkbox"/> 総合点検 <input type="checkbox"/> 2回目             | 定期点検シール記入 <input checked="" type="checkbox"/>                         |      |          |              |
| 出張・引取 | 修理 <input type="checkbox"/> 点検のみ <input type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/> | 修理表示貼付 <input type="checkbox"/>                                       |      |          |              |

|                           |                                        |           |                                                    |
|---------------------------|----------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|
| 不具合状況、依頼内容、異常履歴           |                                        |           |                                                    |
|                           |                                        |           |                                                    |
|                           |                                        |           |                                                    |
| 不具合原因、作業内容                |                                        |           |                                                    |
|                           |                                        |           |                                                    |
|                           |                                        |           |                                                    |
| 点検項目                      |                                        |           |                                                    |
| フタロック                     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 殺菌槽 LED   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 酸素ライン                     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | エアライン     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| アルコールライン                  | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | オゾン水濃度計動作 | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> ハル数 559     |
| オゾンセンサ                    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 排水栓、排水ライン | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 給水ライン                     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 細管送水ライン   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 濃度計流量                     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 排気ライン     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 水位センサー                    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | オゾン濃度     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 履歴 0.67 ppm |
| 水漏れ確認                     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 異常音、振動    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 清掃                        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 電源コード     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| トレイ                       | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 殺菌チューブ類   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 殺菌槽コネクタ                   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | プログラムVer  | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 0204/702.B  |
| 作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項 |                                        |           |                                                    |
|                           |                                        |           |                                                    |
|                           |                                        |           |                                                    |

|          |                |                                                                                |              |              |
|----------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 装置<br>情報 | 交換後運転回数: 607 回 | 更新 (リセット) 実施 <input checked="" type="checkbox"/> ・未実施 <input type="checkbox"/> | 消毒: 653 回    | 消毒+アル: 531 回 |
|          | リークチェック: 0 回   | 自己洗浄: 2 回                                                                      | アルコール単独: 0 回 | エア単独: 0 回    |

|           |       |                                     |      |                                                       |
|-----------|-------|-------------------------------------|------|-------------------------------------------------------|
| 交換部品名称    | 部品コード | 交換                                  | 数量   | 交換部品製造番号                                              |
| 定期交換部品セット |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1セット | オゾン水濃度計 NO. 12061082 → NO. 12081153                   |
| 排水フィルター   | 新型    | <input checked="" type="checkbox"/> | 1個   | オゾンセンサー NO. 091125-016 → NO. 130529-030               |
| 給水フィルター   |       | <input type="checkbox"/>            | 1個   | オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、コネクタ継手、排水フィルター、給水フィルターの6点は製造番号なし |
|           |       | <input type="checkbox"/>            |      |                                                       |
|           |       | <input type="checkbox"/>            |      |                                                       |

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| お客様ご確認署名欄                         | 27 年 9 月 28 日 |
| ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。   | 中野 和津世        |
| ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。 |               |
| ご署名                               |               |

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店  
大阪府大阪市中央区今橋 1-6-1  
TEL: 06-6228-3311

|       |     |
|-------|-----|
| 責任技術者 | 作業者 |
|       | 中山  |