

保守点検・修理 報告書

管理 No. _____
発行日 平成 27年 12月 3日

販売名	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S		製造番号	: 300009	
作業年月日	平成 27年 12月 3日		作業時間	: _____ Hr	
顧客名	クリニック内藤 御中		ご担当	: 院長先生 様	
所在地	兵庫県伊丹市中野北3-8-41		電話番号	: 072-777-7700	
販売店			ご担当	様	
納入年月日	平成 24年 12月 10日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品		
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 3回目	定期点検シール記入 ☒			
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐			

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 539
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.72 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	プログラムVer	正常 ☒ 0202 / T02.B

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

装置 情報	交換後運転回数: 223 回	更新 (リセット) (実施) ・ 未実施	消毒: 62 回	消毒+アル: 590 回
	リークチェック: 399 回	自己洗浄: 265 回	アルコール単独: 0 回	エア単独: 0 回

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品製造番号
定期交換部品セット		☒	1セット	オゾン水濃度計 NO. 12071128 → NO. 11100790
排水フィルター		☒	1個	オゾンセンサー NO. 101026-017 → NO. 091126-014
給水フィルター		☐	1個	オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、コネクタ継手、排水フィルター、給水フィルターの6点は製造番号なし
		☐		

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。

・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

平成 27 年 12 月 3 日

ご署名 内藤 正樹

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋 1-6-1
TEL: 06-6228-3311

責任技術者	作業者
	中山