

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成 27年 12月 2日

販売名	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S	製造番号	: 300147
作業年月日	平成 27年 12月 2日	作業時間	: Hr
顧客名	芦屋セントマリア病院 御中	ご担当	: 院長先生 様
所在地	兵庫県芦屋市大原町5番20号	電話番号	: 0797-23-1771
販売店		ご担当	様
納入年月日	平成 25年 11月 28日	保証期間	内 ☒ 外 ☐
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 回目	定期点検シール記入	☐
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☒	修理表示貼付	☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

水槽内送気送水鉗子コネクタ-が消毒後多々外れている。

不具合原因、作業内容

水槽内送気送水鉗子コネクタ-劣化により外れやすくなっていた。

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルス数 337
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.7/ ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	プログラムVer	正常 ☒ 0204/ T02BV

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

水槽内送気送水鉗子コネクタ-を交換し終了。

装置情報	交換後運転回数: 260 回	更新（リセット）実施・未実施	消毒: 262 回	消毒+アル: 265 回
	リークチェック: 1 回	自己洗浄: 10/ 回	アルコール単独: 3 回	エア単独: 6 回

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品製造番号
定期交換部品セット		☐	1セット	オゾン水濃度計 NO, → NO,
排水フィルター（新型）		☐	1個	オゾンセンサー NO, → NO,
給水フィルター		☐	1個	オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、コネクタ継手、排水フィルター、給水フィルターの6点は製造番号なし
水槽内送気送水 鉗子コネクタ		☒	1セット	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

ご署名

平成 公生

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋 1-6-1
TEL: 06-6228-3311

責任技術者	作業者
	中山