

保守点検・修理 報告書

管理 No. _____
発行日 平成 27年 10月 29日

販売名	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S		製造番号	: 300264	
作業年月日	平成 27年 10月 29日		作業時間	: _____ Hr	
顧客名	医療法人敬愛会 大塚病院 御中		ご担当	: 院長先生 様	
所在地	兵庫県丹波市氷上町絹山513		電話番号	: 0795-82-7534	
販売店			ご担当	様	
納入年月日	平成 26年 5月 15日	保証期間 内 ☒ 外 ☐	付属品		
作業区分	保守点検 ☐	総合点検 ☐	回目	定期点検シール記入 ☐	
出張・引取	修理 ☐	点検のみ ☐	その他 ☒	修理表示貼付 ☒	

不具合状況、依頼内容、異常履歴
・10/29(木) E:111 排水注意 が2回発生。

不具合原因、作業内容
・排水フィルターの目詰まりにより、エラーが発生したと思われています。

点検項目

フタロック	正常	☒	殺菌槽 LED	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	エアライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ バルブ数 373
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.69 ppm
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
清掃	正常	☒	電源コード	正常	☒
トレイ	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒	プログラムVer	正常	☒ 0204 / T02BV

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項
・排水フィルターを新型に交換、正常に動作した為 終了。

装置 情報	交換後運転回数: 191 回	更新(リセット)実施・未実施 ☒	消毒: 73 回	消毒+アル: 486 回
	リークチェック: 0 回	自己洗浄: 286 回	アルコール単独: 0 回	エア単独: 0 回

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品製造番号
定期交換部品セット		☐	1セット	オゾン水濃度計 NO, → NO,
排水フィルター	新型	☒	1個	オゾンセンサ NO, → NO,
給水フィルター		☐	1個	オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、リレー継手、排水フィルター、給水フィルターの6点は製造番号なし
		☐		

お客様ご確認署名欄
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

27年 10月 29日
ご署名 古川 順子

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋1-6-1
TEL: 06-6228-3311

責任技術者	作業者
	中山