

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成27年12月9日

販売名	ホジメ内視鏡消毒機 OED-1000N		製造番号:	300473
作業年月日	平成27年12月9日		作業時間:	/ Hr
顧客名	公立宝塚総合病院		TEL:	
所在地			担当	様
販売店	福本医科器械(株)		担当	福住 様
納入年月日	平成27年1月28日	保証期間 内 ☒ 外 ☐	付属品	
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

- 定期点検ラップ表示

不具合原因、作業内容

- 使用回数1500回運転確認済

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 386
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.69 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

- 定期交換部品の交換

装置情報	交換後運転回数: 1665 更新(リセット) ☒ 実施・未実施	殺菌: 536	殺菌+アル: 1129
	リークチェック: 86P 自己洗浄: 81	アルコール単独: 4	エア単独: 1

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1			☐	
排水栓		☒	1			☐	
ホジメ濃度計		☒	1			☐	
脱気フィルター		☒	1			☐	
		☐				☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

ご署名

印

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋1-6-1
TEL: 06-6228-3311

責任技術者

作業者

