

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成 27年 11月 13日

販売名	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S		製造番号	: 300344
作業年月日	平成 27年 11月 13日		作業時間	: Hr
顧客名	堀井医院 御中		ご担当	: 院長先生 様
所在地	大阪府茨木市舟木町5番26号		電話番号	: 0726-32-2233
販売店			ご担当	様
納入年月日	平成 26年 7月 28日	保証期間 内 ☒ 外 ☐	付属品	
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 回目	定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☒	修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

水槽内送気送水 継手口コネクター - 破損。

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 351
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.70 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	プログラムVer	正常 ☒ 0204 / T02BV

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

コネクターを強化タイプに交換し終了。

装置情報	交換後運転回数: 652回	更新（リセット）実施・未実施 ☒	消毒: 10/8 回	消毒+アル: 1248 回
	リークチェック: 0 回	自己洗浄: 59 回	アルコール単独: 0 回	エア単独: 0 回

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品製造番号
定期交換部品セット		☐	1セット	オゾン水濃度計 NO, → NO,
排水フィルター		☐	1個	オゾンセンサー NO, → NO,
給水フィルター	(中空糸)	☐	1個	オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、コネクタ継手、
水槽内送気送水 継手口コネクター		☒	2個	排水フィルター、給水フィルターの6点は製造番号なし
		☐		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

27年 11月 13日

ご署名

堀井 孝宏

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋1-6-1
TEL: 06-6228-3311

責任技術者	作業者
	中山