

## 点検確認書

株式会社 IHI シバウラ  
環境事業部

GF 用 修理+オーバーホールA

エラー 2 及び給水量不足異常

点検担当者: 中澤一裕

|               |                         |      |        |                   |        |
|---------------|-------------------------|------|--------|-------------------|--------|
| 点検年月日         | 平成 24 年 3 月 7 日         | 機種名  | ONW-10 | 製造機番              | 000684 |
| 設置場所          | 和歌山県御坊市湯川町小松原 6 1 5 - 1 |      |        | TEL: 0738-24-2222 |        |
| 新鋭工業 (株) 伝票番号 | No. 03-12020            | 使用回数 | 3173   | 御対応者              | 黒田様    |

| 点検項目       | 点検結果 |                                     |                                            |                                     |    |                          |
|------------|------|-------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|----|--------------------------|
| スイッチ類      |      |                                     |                                            |                                     |    |                          |
| 電源釦        | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 交換                                         | <input type="checkbox"/>            |    |                          |
| フィルタリセット釦  | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 交換                                         | <input type="checkbox"/>            |    |                          |
| 運転/停止釦     | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 交換                                         | <input type="checkbox"/>            |    |                          |
| アルコールモード釦  | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 交換                                         | <input type="checkbox"/>            |    |                          |
| ランプ類       |      |                                     |                                            |                                     |    |                          |
| 操作パネル      | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 交換                                         | <input type="checkbox"/>            |    |                          |
| 蛍光灯        | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 交換                                         | <input type="checkbox"/>            |    |                          |
| 洗浄動作       |      |                                     |                                            |                                     |    |                          |
| フタロック      | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整                                         | <input type="checkbox"/>            | 交換 | <input type="checkbox"/> |
| 給水         | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整                                         | <input type="checkbox"/>            | 交換 | <input type="checkbox"/> |
| 細管洗浄 順方向   | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整                                         | <input type="checkbox"/>            | 交換 | <input type="checkbox"/> |
| 細管洗浄 逆方向   | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整                                         | <input type="checkbox"/>            | 交換 | <input type="checkbox"/> |
| 細管洗浄 エアパージ | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整                                         | <input type="checkbox"/>            | 交換 | <input type="checkbox"/> |
| アルコールフラッシュ | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整                                         | <input type="checkbox"/>            | 交換 | <input type="checkbox"/> |
| オゾン分解ファン   | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整                                         | <input type="checkbox"/>            | 交換 | <input type="checkbox"/> |
| 排水         | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整                                         | <input type="checkbox"/>            | 交換 | <input type="checkbox"/> |
| 異常音、振動     | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整                                         | <input type="checkbox"/>            | 交換 | <input type="checkbox"/> |
| 性能確認       |      |                                     |                                            |                                     |    |                          |
| オゾン水濃度     | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 濃度：0.62 mg/L                               |                                     |    |                          |
| オゾンインジケータ  | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> |                                            |                                     |    |                          |
| 酸素発生       | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 濃度：95.2 % 流量：0.76 L/min 圧力：0.033～0.169 MPa |                                     |    |                          |
| 水漏れ確認      |      |                                     |                                            |                                     |    |                          |
| 装置外        | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整                                         | <input type="checkbox"/>            | 交換 | <input type="checkbox"/> |
| 装置内        | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整                                         | <input type="checkbox"/>            | 交換 | <input type="checkbox"/> |
| 清掃         |      |                                     |                                            |                                     |    |                          |
| 外装         | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 清掃                                         | <input checked="" type="checkbox"/> |    |                          |
| 内部         | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 清掃                                         | <input checked="" type="checkbox"/> |    |                          |
| 洗浄コネクタ     | 正常   | <input type="checkbox"/>            | 調整                                         | <input type="checkbox"/>            | 交換 | <input type="checkbox"/> |
| 洗浄チューブ     | 正常   | <input type="checkbox"/>            | 調整                                         | <input type="checkbox"/>            | 交換 | <input type="checkbox"/> |

| 交換部品       |                                        | 数量 | コメント                                            |
|------------|----------------------------------------|----|-------------------------------------------------|
| 吸着筒、吸湿筒    | 交換 <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | 故障部品および定期交換部品を交換いたしました。<br>装置性能測定の結果異常ありませんでした。 |
| ドレンフィルター   | 交換 <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |                                                 |
| オゾン分解触媒    | 交換 <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |                                                 |
| 水位レベルセンサー  | 交換 <input checked="" type="checkbox"/> | 3  |                                                 |
| 排水バルブ用チューブ | 交換 <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |                                                 |
| 水ポンプ       | 交換 <input checked="" type="checkbox"/> | 3  | 交換済み部品の写真を添付いたします。                              |
| オゾンセンサー    | 交換 <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |                                                 |
| 給水電磁弁      | 交換 <input checked="" type="checkbox"/> | 2  |                                                 |
| トレイ ASSY   | 交換 <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |                                                 |
|            |                                        |    |                                                 |

中  
24.3.7  
澤

# 工事写真

|               |                         |      |        |                    |        |
|---------------|-------------------------|------|--------|--------------------|--------|
| 点検年月日         | 平成 24年 3月7日             | 機種名  | ONW-10 | 製造機番               | 000684 |
| 設置場所          | 和歌山県御坊市湯川町小松原 6 1 5 - 1 |      |        | TEL : 0738-24-2222 |        |
| 新鋭工業 (株) 伝票番号 | No. 03-12020            | 使用回数 | 3173   | 御対応者               | 黒田様    |


1 : 定期交換部品一式



2 : 水ポンプ、エアコンプレッサー、排水バルブ用チューブ



3 : 水位レベルセンサー、給水電磁弁、フタスプリング、オゾンセンサー

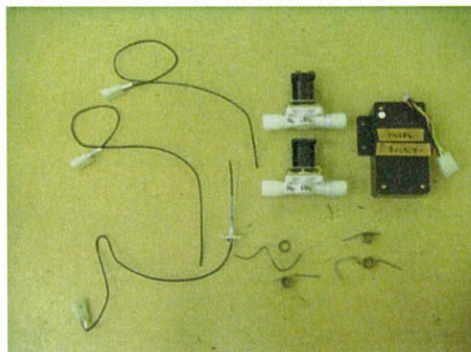

4 : トレーASSY

