

## 保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成 28年 1月 8日

|       |                                                                                                   |                                                                       |      |                |  |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------|----------------|--|
| 販売名   | オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S                                                                              |                                                                       | 製造番号 | : 300241       |  |
| 作業年月日 | 平成 28年 1月 8日                                                                                      |                                                                       | 作業時間 | : Hr           |  |
| 顧客名   | はり内科クリニック 御中                                                                                      |                                                                       | ご担当  | : 院長先生 様       |  |
| 所在地   | 兵庫県加古川市加古川町栗津770-18                                                                               |                                                                       | 電話番号 | : 079-454-8510 |  |
| 販売店   |                                                                                                   |                                                                       | ご担当  | 様              |  |
| 納入年月日 | 平成 26年 4月 23日                                                                                     | 保証期間 内 <input checked="" type="checkbox"/> 外 <input type="checkbox"/> | 付属品  |                |  |
| 作業区分  | 保守点検 <input type="checkbox"/> 総合点検 <input type="checkbox"/>                                       | 定期点検シール記入 <input checked="" type="checkbox"/>                         |      |                |  |
| 出張・引取 | 修理 <input type="checkbox"/> 点検のみ <input type="checkbox"/> その他 <input checked="" type="checkbox"/> | 修理表示貼付 <input type="checkbox"/>                                       |      |                |  |

|                                                 |                                                          |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 不具合状況、依頼内容、異常履歴                                 |                                                          |
| 排水注意 (E=111) 47発 1/6v8 計3回                      |                                                          |
| 不具合原因、作業内容                                      |                                                          |
| 排水フィルター交換、(詰り口エラー)                              |                                                          |
| 点検項目                                            |                                                          |
| フタロック 正常 <input checked="" type="checkbox"/>    | 殺菌槽 LED 正常 <input checked="" type="checkbox"/>           |
| 酸素ライン 正常 <input checked="" type="checkbox"/>    | エアライン 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| アルコールライン 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | オゾン水濃度計動作 正常 <input checked="" type="checkbox"/> バルブ数    |
| オゾンセンサ 正常 <input checked="" type="checkbox"/>   | 排水栓、排水ライン <del>正常</del> <input type="checkbox"/> → 排水交換  |
| 給水ライン 正常 <input checked="" type="checkbox"/>    | 細管送水ライン 正常 <input checked="" type="checkbox"/>           |
| 濃度計流量 正常 <input checked="" type="checkbox"/>    | 排気ライン 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 水位センサー 正常 <input checked="" type="checkbox"/>   | オゾン濃度 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 履歴 0.70 ppm |
| 水漏れ確認 正常 <input checked="" type="checkbox"/>    | 異常音、振動 正常 <input checked="" type="checkbox"/>            |
| 清掃 正常 <input checked="" type="checkbox"/>       | 電源コード 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| トレイ 正常 <input checked="" type="checkbox"/>      | 殺菌チューブ類 正常 <input checked="" type="checkbox"/>           |
| 殺菌槽コネクタ 正常 <input checked="" type="checkbox"/>  | プログラムVer 正常 <input checked="" type="checkbox"/>          |
| 作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項                      |                                                          |

|          |                |                  |              |              |
|----------|----------------|------------------|--------------|--------------|
| 装置<br>情報 | 交換後運転回数: 139 回 | 更新 (リセット) 実施・未実施 | 消毒: 6 回      | 消毒+アル: 311 回 |
|          | リークチェック: 0 回   | 自己洗浄: 309 回      | アルコール単独: 0 回 | エア単独: 0 回    |

| 交換部品名称    | 部品コード | 交換                                  | 数量   | 交換部品製造番号                                              |
|-----------|-------|-------------------------------------|------|-------------------------------------------------------|
| 定期交換部品セット |       | <input type="checkbox"/>            | 1セット | オゾン水濃度計 NO, → NO,                                     |
| 排水フィルター   | 新設    | <input checked="" type="checkbox"/> | 1個   | オゾンセンサ NO, → NO,                                      |
| 給水フィルター   |       | <input type="checkbox"/>            | 1個   | オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、コネクタ継手、排水フィルター、給水フィルターの6点は製造番号なし |
|           |       | <input type="checkbox"/>            |      |                                                       |

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| お客様ご確認署名欄                         | 年 28月 8 日 |
| ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。   |           |
| ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。 |           |
| ご署名 播 穰 治                         |           |

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店  
大阪府大阪市中央区今橋1-6-1  
TEL: 06-6228-3311

|       |             |
|-------|-------------|
| 責任技術者 | 作業者         |
|       | 中山<br>代理 福田 |