

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成 28年 1月 27日

販売名	オゾン水内視鏡洗浄機 ONW-10			製造番号	: 357
作業年月日	平成 28年 1月 27日			作業時間	: Hr
顧客名	井上医院 御中			ご担当	: 院長先生 様
所在地	兵庫県養父市浅野368-2			電話番号	: 079-664-0051
販売店				ご担当	様
納入年月日	平成 16年 4月 16日	保証期間	内 ☐ 外 ☒	付属品	
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐	8回目	定期点検シール記入	☒
出張・引取	修理 ☐	点検のみ ☐	その他 ☐	修理表示貼付	☐

点検項目		点検項目	
電源釦	正常 ☒	オゾン分解ファン	正常 ☒
フィルタリセット釦	正常 ☒	排水	正常 ☒
運転/停止釦	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
アルコールモード釦	正常 ☒	オゾンインジケータ	正常 ☒
操作パネル	正常 ☒	酸素発生	正常 ☒
蛍光灯	正常 ☒	水漏れ確認 装置外	正常 ☒
フタロック	正常 ☒	水漏れ確認 装置内	正常 ☒
給水	正常 ☒	洗浄コネクタ	正常 ☒
細管洗浄 順方向	正常 ☒	洗浄チューブ	正常 ☒
細管洗浄 逆方向	正常 ☒		
細管洗浄 エアパージ	正常 ☒		
アルコールフラッシュ	正常 ☒		
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項			

装置情報	総運転回数: 4,700回	更新(リセット) ☒ 実施・ ☐ 未実施	交換後運転回数: 595回
酸素発生	濃度: 91.2%	流量: 0.178 L/min	圧力: 79 ~ 149 MPa

交換部品名称	部品コード	交換	数量	< 交換部品製造番号 >
オゾン分解触媒		☒	一式	吸着筒・吸湿筒
ドレン用フィルタ		☒	一式	NO. SPS-11418 → NO. SPS11903
吸着筒		☒	一個	オゾン分解触媒、ドレン用フィルタは製造番号なし
吸湿筒		☒	一個	
		☐		

お客様ご確認署名欄	28年 1月 27日
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。	
・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。	
ご署名 太田垣 公美	

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋 1-6-1
TEL: 06-6228-3311

責任技術者	作業者
	中山