

保守点検・修理 報告書

管理 No. _____
発行日 平成 28年 1月 13日

販売名	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S		製造番号	: 300472	
作業年月日	平成 28年 1月 13日		作業時間	:	Hr
顧客名	新井内科クリニック 御中		ご担当	:	院長先生 様
所在地	大阪府堺市東区引野町3-48-2		電話番号	:	072-288-1011
販売店			ご担当	:	様
納入年月日	平成 27年 1月 6日	保証期間	内 ☒ 外 ☐	付属品	
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 1回目	定期点検シール記入 ☒			
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐			

不具合状況、依頼内容、異常履歴					
不具合原因、作業内容					
点検項目					
フタロック	正常	☒	殺菌槽 LED	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	エアライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ バルブ数 489
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.72 ppm
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
清掃	正常	☒	電源コード	正常	☒
トレイ	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒	プログラムVer	正常	☒ 0205/T02C
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項					

装置 情報	交換後運転回数: 1560 回	更新（リセット）実施 ☒ ・未実施 ☐	消毒: 1062 回	消毒+アル: 499 回
	リークチェック: 0 回	自己洗浄: 2 回	アルコール単独: 0 回	エア単独: 0 回

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品製造番号
定期交換部品セット	新型	☒	1セット	オゾン水濃度計 NO. 13091529 → NO. 11030618
排水フィルター		☒	1個	オゾンセンサ NO. 13114-004 → NO. 091216-010
給水フィルター		☐	1個	オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、コネクタ継手、排水フィルター、給水フィルターの6点は製造番号なし
		☐		

お客様ご確認署名欄	
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。	
・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。	
年 月 日	
ご署名 新井 敬一	

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店 大阪府大阪市中央区今橋 1-6-1 TEL: 06-6228-3311	責任技術者	作業者
		中山