

修理報告書（引取り修理）

修理依頼番号

03-20244

No. 160215

配布先	納入先	新鋭工業（株）大阪支店 殿		機種	ONW-10
客先	所在地	兵庫県芦屋市茶屋之町2-21		機番	001014
環営	ユーザー名	吉田内科クリニック 様		納入日	平成18年6月1日
環品	点検者	中澤一裕	作業時間	受付日	平成27年10月22日
	返送先	納入先と同じ		発送日	平成28年2月1日
計	3				

修理依頼・異常内容

エラー8：「オゾンセンサ故障」または「オゾンガス漏れ」異常

不具合原因（故障箇所）と処置予定

[1] 点検結果（不具合箇所と不具合原因）

オゾン分解触媒の性能低下とオゾンセンサの故障が原因でした。
この部品の他に劣化している部品を交換して復旧いたしました。

写真1：定期交換部品

写真2：水位レベルセンサー、チューブ、オゾンセンサ



[2] 修理・点検内容

- 部品交換・・・下表と写真をご参照ください。
- オゾン水濃度測定：0.50～0.61mg/L・・・正常
- PSA（酸素発生装置）性能点検
酸素濃度：92.8% 酸素流量：0.76L/min 圧力：0.098～0.182MPa
- 運転プログラムバージョンアップ・・・Ver.8⇒Ver.10
12回運転するとフィルターランプが点滅して清掃時期をお知らせします。
- 運転確認 異常なし。インジケータ変色 異常なし
- 運転カウンタ：2204

一以上一

交換部品

部品番号	部品名称	数量	備考
1～3	定期交換部品	1式	
	吸着筒、吸湿筒、ドレンフィルタ、分解触媒		
4	オゾンセンサ	1台	
5	水位レベルセンサー	3本	
6	配管チューブ、パッキン	1式	

承認



審査



作成

H28. 2. 15

中澤