

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成 28年 2月 10日

販売名	オゾン水内視鏡洗浄機 ONW-10		製造番号	: 595
作業年月日	平成 28年 2月 10日		作業時間	: Hr
顧客名	江本クリニック 御中		ご担当	: 院長先生 様
所在地	大阪府堺市北区長曽根町1467-1エイトワンビル1階		電話番号	: 072-240-0122
販売店			ご担当	様
納入年月日	平成 17年 2月 14日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品	
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 6回目	定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修 理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐		

点検項目		点検項目	
電源釦	正常 ☒	オゾン分解ファン	正常 ☒
フィルタリセット釦	正常 ☒	排水	正常 ☒
運転/停止釦	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
アルコールモード釦	正常 ☒	オゾンインジケータ	正常 ☒
操作パネル	正常 ☒	酸素発生	正常 ☒
蛍光灯	正常 ☒	水漏れ確認 装置外	正常 ☒
フタロック	正常 ☒	水漏れ確認 装置内	正常 ☒
給水	正常 ☒	洗浄コネクタ	正常 ☒
細管洗浄 順方向	正常 ☒	洗浄チューブ	正常 ☒
細管洗浄 逆方向	正常 ☒		
細管洗浄 エアパージ	正常 ☒		
アルコールフラッシュ	正常 ☒		
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項			

装置情報	総運転回数: 6987 回	更新 (リセット) 実施 ☒ ・未実施 ☐	交換後運転回数: 815 回
酸素発生	濃度: 91.2 %	流量: 0.77 L/min	圧力: 91 ~ 168 MPa

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品製造番号
オゾン分解触媒		☒	一式	吸着筒・吸湿筒
ドレン用フィルタ		☒	一式	NO. SPS-11208 → NO. SPS-11910
吸着筒		☒	一個	オゾン分解触媒、ドレン用フィルタは製造番号なし
吸湿筒		☒	一個	
		☐		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

H28年 2月 10日

ご署名 江本 節

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋 1-6-1
TEL: 06-6228-3311

責任技術者	作業者
	中山