

# 保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成 28年 3月 3日

|       |                                                                                        |                                                                       |      |                |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------|----------------|
| 販売名   | オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S                                                                   |                                                                       | 製造番号 | : 300192       |
| 作業年月日 | 平成 28年 3月 3日                                                                           |                                                                       | 作業時間 | : Hr           |
| 顧客名   | 北村診療所 御中                                                                               |                                                                       | ご担当  | : 院長先生 様       |
| 所在地   | 大阪府大阪市大正区泉尾3-3-22                                                                      |                                                                       | 電話番号 | : 06-6551-2250 |
| 販売店   |                                                                                        |                                                                       | ご担当  | 様              |
| 納入年月日 | 平成 26年 3月 5日                                                                           | 保証期間 内 <input type="checkbox"/> 外 <input checked="" type="checkbox"/> | 付属品  |                |
| 作業区分  | 保守点検 <input checked="" type="checkbox"/> 総合点検 <input type="checkbox"/> 2回目             | 定期点検シール記入 <input checked="" type="checkbox"/>                         |      |                |
| 出張・引取 | 修理 <input type="checkbox"/> 点検のみ <input type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/> | 修理表示貼付 <input type="checkbox"/>                                       |      |                |

|                                                 |                                                            |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 不具合状況、依頼内容、異常履歴                                 |                                                            |
|                                                 |                                                            |
| 不具合原因、作業内容                                      |                                                            |
|                                                 |                                                            |
| 点検項目                                            |                                                            |
| フタロック 正常 <input checked="" type="checkbox"/>    | 殺菌槽 LED 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 酸素ライン 正常 <input checked="" type="checkbox"/>    | エアライン 正常 <input checked="" type="checkbox"/>               |
| アルコールライン 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | オゾン水濃度計動作 正常 <input checked="" type="checkbox"/> ハルス数 731  |
| オゾンセンサ 正常 <input checked="" type="checkbox"/>   | 排水栓、排水ライン 正常 <input checked="" type="checkbox"/>           |
| 給水ライン 正常 <input checked="" type="checkbox"/>    | 細管送水ライン 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 濃度計流量 正常 <input checked="" type="checkbox"/>    | 排気ライン 正常 <input checked="" type="checkbox"/>               |
| 水位センサー 正常 <input checked="" type="checkbox"/>   | オゾン濃度 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 履歴 0.73 ppm   |
| 水漏れ確認 正常 <input checked="" type="checkbox"/>    | 異常音、振動 正常 <input checked="" type="checkbox"/>              |
| 清掃 正常 <input checked="" type="checkbox"/>       | 電源コード 正常 <input checked="" type="checkbox"/>               |
| トレイ 正常 <input checked="" type="checkbox"/>      | 殺菌チューブ類 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 殺菌槽コネクタ 正常 <input checked="" type="checkbox"/>  | マニホールド周辺フューズ 正常 <input checked="" type="checkbox"/>        |
|                                                 | プログラムVer 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 0204/T02BV |
| 作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項                       |                                                            |
|                                                 |                                                            |

|          |                |                                                     |              |              |
|----------|----------------|-----------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 装置<br>情報 | 交換後運転回数: 475 回 | 更新（リセット） <input checked="" type="checkbox"/> 実施・未実施 | 消毒: 153 回    | 消毒+アル: 772 回 |
|          | リークチェック: 1 回   | 自己洗浄: 363 回                                         | アルコール単独: 0 回 | エア単独: 0 回    |

| 交換部品名称    | 部品コード | 交換                                  | 数量   | 交換部品製造番号                                              |
|-----------|-------|-------------------------------------|------|-------------------------------------------------------|
| 定期交換部品セット |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1セット | オゾン水濃度計 NO.10050201 → NO.13021317                     |
| 排水フィルター   |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1個   | オゾンセンサ NO.110824-014 → NO.131119-017                  |
| 給水フィルター   |       | <input type="checkbox"/>            | 1個   | オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、コネクタ継手、排水フィルター、給水フィルターの6点は製造番号なし |
| バリエータ     |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1本   |                                                       |
|           |       | <input type="checkbox"/>            |      |                                                       |

|                                                                                                                            |  |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|
| お客様ご確認署名欄                                                                                                                  |  | 年 月 日 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。</li> <li>本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。</li> </ul> |  |       |
| ご署名                                                                                                                        |  | 中山 幸英 |

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店  
大阪府大阪市中央区今橋1-6-1  
TEL: 06-6228-3311

|       |     |
|-------|-----|
| 責任技術者 | 作業者 |
|       | 中山  |