

管理 No.

発行日 平成 28年 3月 2日

販売名	オゾン水内視鏡洗浄機 ONW-10		製造番号	: 241
作業年月日	平成 28年 3月 2日		作業時間	: HR
顧客名	黒本診療所 御中		ご担当	: 院長先生 様
所在地	大阪府摂津市香露園33-14		電話番号	: 072-636-6001
販売店			ご担当	様
納入年月日	平成 16年 1月 10日	保証期間	内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☐	総合点検 ☐	回目	定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修理 ☒	点検のみ ☐	その他 ☐	修理表示貼付 ☒

点検項目			点検項目		
電源釦	正常	✓	オゾン分解ファン	正常	✓
フィルタリセット釦	正常	✓	排水	正常	✓
運転/停止釦	正常	✓	異常音、振動	正常	✓
アルコールモード釦	正常	✓	オゾンインジケータ	正常	✓
操作パネル	正常	✓	酸素発生	正常	✓
蛍光灯	正常	✓	水漏れ確認 装置外	正常	✓
フタロック	正常	✓	水漏れ確認 装置内	正常	✓
給水	正常	✓	洗浄コネクタ	正常	✓
細管洗浄 順方向	正常	✓	洗浄チューブ	正常	✓
細管洗浄 逆方向	正常	✓			
細管洗浄 エアパージ	正常	✓			
アルコールフラッシュ	正常	✓			
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項					
・酸素濃度が61.9%に低下していた為、下記部品を交換。 正常作動したので終了。					

装置情報	総運転回数: 933 回	更新 (リセット) 実施・未実施	交換後運転回数: 1500 回
酸素発生	濃度: 91.6 %	流量: 0.77 L/min	圧力: 83 ~ 166 MPa

交換部品名称	部品コード	交換	数量	＜ 交換部品製造番号 ＞
オゾン分解触媒		☒	一式	吸着筒・吸湿筒
ドレン用フィルタ		☒	一式	NO. <i>SPS-0263</i> → NO. <i>SPS-11888</i>
吸着筒		☒	一個	オゾン分解触媒、ドレン用フィルタは製造番号なし
吸湿筒		☒	一個	
		☐		

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。

・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

ご署名

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋 1-6-1
TEL : 06-6228-3311

責任技術者	作業者
	中山