

保守点検・修理 報告書

管理 No. _____
発行日 平成 28年 1月 14日

販売名	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S		製造番号	: 300345	
作業年月日	平成 28年 1月 14日		作業時間	:	Hr
顧客名	木下内科クリニック 御中		ご担当	:	院長先生 様
所在地	大阪府大阪市平野区背戸口5丁目6番29号		電話番号	:	06-6790-1200
販売店			ご担当	:	様
納入年月日	平成 26年 8月 7日	保証期間	内 ☒ 外 ☐	付属品	
作業区分	保守点検 ☐	総合点検 ☐	回目	定期点検シール記入 ☐	
出張・引取	修理 ☐	点検のみ ☐	その他 ☒	修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴
・1/9(土)、1/14(木)、15(金) 排水注意が合計2回発生。

不具合原因、作業内容
・排水フィルターの目詰まりが原因と考えられます。

点検項目

フタロック	正常	☒	殺菌槽 LED	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	エアライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ バルブ数 257
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.72 ppm
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
清掃	正常	☒	電源コード	正常	☒
トレイ	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒	プログラムVer	正常	☒ 0204/T02BV

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項
・排水フィルターを新型に交換。正常作動したので終了。

装置 情報	交換後運転回数: 57 回	更新（リセット）実施・未実施 ☒	消毒: 2 回	消毒+アル: 155 回
	リークチェック: 0 回	自己洗浄: 0 回	アルコール単独: 0 回	エア単独: 0 回

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品製造番号
定期交換部品セット		☐	1セット	オゾン水濃度計 NO, ☒ → NO, ☒
排水フィルター（新型）		☒	1個	オゾンセンサ NO, ☒ → NO, ☒
給水フィルター		☐	1個	オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、コネクタ継手、排水フィルター、給水フィルターの6点は製造番号なし
		☐		

お客様ご確認署名欄
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

28 年 1 月 14 日
ご署名 山口 貴行

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋 1-6-1
TEL: 06-6228-3311

責任技術者	作業者
	中山