

保守点検・修理 報告書

管理 No. 発行日 平成 28年 3月 9日

販売名	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S		製造番号	: 300492	
作業年月日	平成 28年 3月 9日		作業時間	:	Hr
顧客名	南和病院 御中		ご担当	:	院長先生 様
所在地	奈良県吉野郡大淀町福神1番地181		電話番号	:	0747-54-5800
販売店			ご担当	:	様
納入年月日	平成 27年 3月 27日	保証期間 内 ☒ 外 ☐	付属品		
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 1回目	定期点検シール記入 ☒			
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐			

不具合状況、依頼内容、異常履歴	
不具合原因、作業内容	
点検項目	
フタロック 正常 ☒	殺菌槽 LED 正常 ☒
酸素ライン 正常 ☒	エアライン 正常 ☒
アルコールライン 正常 ☒	オゾン水濃度計動作 正常 ☒ バルブ数 989
オゾンセンサ 正常 ☒	排水栓、排水ライン 正常 ☒
給水ライン 正常 ☒	細管送水ライン 正常 ☒
濃度計流量 正常 ☒	排気ライン 正常 ☒
水位センサー 正常 ☒	オゾン濃度 正常 ☒ 履歴 0.70 ppm
水漏れ確認 正常 ☒	異常音、振動 正常 ☒
清掃 正常 ☒	電源コード 正常 ☒
トレー 正常 ☒	殺菌チューブ類 正常 ☒
殺菌槽コネクタ 正常 ☒	マニホールド周辺チューブ 正常 ☒
	プログラムVer 正常 ☒ 0205/T02C
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項	

装置 情報	交換後運転回数: 89 回	更新 (リセット) (実施) ・ 未実施	消毒: 23 回	消毒+アル: 66 回
	リークチェック: 34 回	自己洗浄: 0 回	アルコール単独: 0 回	エア単独: 0 回

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品製造番号
定期交換部品セット		☒	1セット	オゾン水濃度計 NO. 13091549 → NO. 15112183
排水フィルター		☐	1個	オゾンセンサー NO. 131102-027 → NO. 151109-010
給水フィルター		☐	1個	オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、コネクタ継手、排水フィルター、給水フィルターの6点は製造番号なし
		☐		
		☐		

お客様ご確認署名欄	28年 3月 9日
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。	
・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。	
ご署名 東 リサ	

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店 大阪府大阪市中央区今橋 1-6-1 TEL : 06-6228-3311	責任技術者	作業者
		中山