

# 保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成 28年 3月 7日

|       |                                                                                        |                                                                       |      |                |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------|----------------|
| 販売名   | オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000                                                                    |                                                                       | 製造番号 | : 100471       |
| 作業年月日 | 平成 28年 3月 7日                                                                           |                                                                       | 作業時間 | : Hr           |
| 顧客名   | 竹井クリニック 御中                                                                             |                                                                       | ご担当  | : 院長先生 様       |
| 所在地   | 大阪府泉南郡熊取町五門東1-7-23                                                                     |                                                                       | 電話番号 | : 072-451-2765 |
| 販売店   |                                                                                        |                                                                       | ご担当  | 様              |
| 納入年月日 | 平成 24年 3月 28日                                                                          | 保証期間 内 <input type="checkbox"/> 外 <input checked="" type="checkbox"/> | 付属品  |                |
| 作業区分  | 保守点検 <input checked="" type="checkbox"/> 総合点検 <input type="checkbox"/> 2回目             | 定期点検シール記入 <input checked="" type="checkbox"/>                         |      |                |
| 出張・引取 | 修理 <input type="checkbox"/> 点検のみ <input type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/> | 修理表示貼付 <input type="checkbox"/>                                       |      |                |

|                                                 |                                                           |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 不具合状況、依頼内容、異常履歴                                 |                                                           |
|                                                 |                                                           |
| 不具合原因、作業内容                                      |                                                           |
|                                                 |                                                           |
| 点検項目                                            |                                                           |
| フタロック 正常 <input checked="" type="checkbox"/>    | 殺菌槽 LED 正常 <input checked="" type="checkbox"/>            |
| 酸素ライン 正常 <input checked="" type="checkbox"/>    | エアライン 正常 <input checked="" type="checkbox"/>              |
| アルコールライン 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | オゾン水濃度計動作 正常 <input checked="" type="checkbox"/> バルブ数 474 |
| オゾンセンサ 正常 <input checked="" type="checkbox"/>   | 排水栓、排水ライン 正常 <input checked="" type="checkbox"/>          |
| 給水ライン 正常 <input checked="" type="checkbox"/>    | 細管送水ライン 正常 <input checked="" type="checkbox"/>            |
| 濃度計流量 正常 <input checked="" type="checkbox"/>    | 排気ライン 正常 <input checked="" type="checkbox"/>              |
| 水位センサー 正常 <input checked="" type="checkbox"/>   | オゾン濃度 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 履歴 0.72 ppm  |
| 水漏れ確認 正常 <input checked="" type="checkbox"/>    | 異常音、振動 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 清掃 正常 <input checked="" type="checkbox"/>       | 電源コード 正常 <input checked="" type="checkbox"/>              |
| トレー 正常 <input checked="" type="checkbox"/>      | 殺菌チューブ類 正常 <input checked="" type="checkbox"/>            |
| 殺菌槽コネクタ 正常 <input checked="" type="checkbox"/>  | マニホールド周辺チューブ 正常 <input checked="" type="checkbox"/>       |
|                                                 | プログラムVer 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 0107/TOLA |
| 作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項                       |                                                           |
|                                                 |                                                           |

|          |                |                                                                              |              |              |
|----------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 装置<br>情報 | 交換後運転回数: 859 回 | 更新（リセット）実施 <input checked="" type="checkbox"/> ・未実施 <input type="checkbox"/> | 殺菌: 704 回    | 殺菌+アル: 939 回 |
|          | リークチェック: 0 回   | 自己洗浄: 7 回                                                                    | アルコール単独: 0 回 | エア単独: 0 回    |

| 交換部品名称    | 部品コード | 交換                                  | 数量   | 交換部品製造番号                                      |
|-----------|-------|-------------------------------------|------|-----------------------------------------------|
| 定期交換部品セット |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1セット | オゾン水濃度計 NO. 11080753 → NO. 13091531           |
| 給水フィルター   |       | <input type="checkbox"/>            | 1個   | オゾンセンサー NO. 110301-013 → NO. B126-016         |
| バルブ       |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1個   | オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、コネクタ継手、給水フィルターの5点は製造番号なし |
|           |       | <input type="checkbox"/>            |      |                                               |
|           |       | <input type="checkbox"/>            |      |                                               |

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| お客様ご確認署名欄                         | 28年 3月 7日 |
| ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。   |           |
| ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。 |           |
| ご署名                               | 竹井 信夫     |

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店  
大阪府大阪市中央区今橋 1-6-1  
TEL: 06-6228-3311

|       |     |
|-------|-----|
| 責任技術者 | 作業者 |
|       | 中山  |